

Compozit refacere bonturi Encore D/C Automix



Pret:

503,06 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Material pentru Reconstructie de Bonturi, Dual (Core Buildup)

Encore D/C este un compozit pentru reconstituiri de bonturi cu priza duala disponibil in cartuse automixante. Consistenta lui unica elimina necesitatea folosirii matricelor iar prin fotopolimerizarea materialului se accelereaza timpul de priza.

Disponibil in varianta cu eliberare de flor si in doua culori: natural si contrast.

Este usor de aplicat cu pistolul automixant D-S 25 1:1 (diferit de cel pentru siliconii de aditie)

Formula automixanta si polimerizarea duala asigura eficienta maxima si o polimerizare in profunzime.

- Fotopolimerizare 20 secunde pentru a accelera priza finala
- Varf ascutit pentru aplicarea materialului pana la baza preparatiei
- Consistenta rigida elimina necesitatea folosirii matricelor
- Se slefuieste precum dentina evitandu-se formarea de santuri
- Disponibil in 2 nuante - natural si contrast
- Radioopac

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cimentatii pivotii de fibra de sticla, de carbon sau de titan cu Encore D/C, reconstruiti fara a fi nevoie sa il aplicati in straturi, accelerati polimerizarea prin fotopolimerizare sau asteptati doar 4 minute, apoi slefuiti.

Desi il aplicati usor ca pe un compozit flow, formula lui unica il confera capacitatea de a nu curge, astfel incat nu aveti nevoie de matrici.

***Nota:**In cazul in care cimentati cu acest material pivotii trebuie sa tratati canalul radicular cu acid si cu **bonding dual**(Adeziv + Activator), pentru a asigura o polimerizare completa si sigura chiar si in interiorul canaliculelor dentinare.*

In cazul in care exista suficienta structura dentara(si in acest caz ne referim la structura dentara ramasa in urma slefuirii bontului) si actul terapeutic nu necesita folosirea pivotilor pentru a creste retentia, puteti folosi doar bonding fotopolimerizabil.

Nu necesita refrigerare.

Caracteristici:

Compressive strength.....222.35 Mpa
Flexural strength..... 110 Mpa
Diametral tensile strength.....48.5 Mpa
Light activated depth of cure.....40 seconds, 2mm

Prezentare

- Nuanta naturala, cu flor. Kit-ul contine un cartus DS-25 de 50g (25 ml.),10 Access Combo Nozzle