


Linguri de amprenta termofomabile set 6 buc

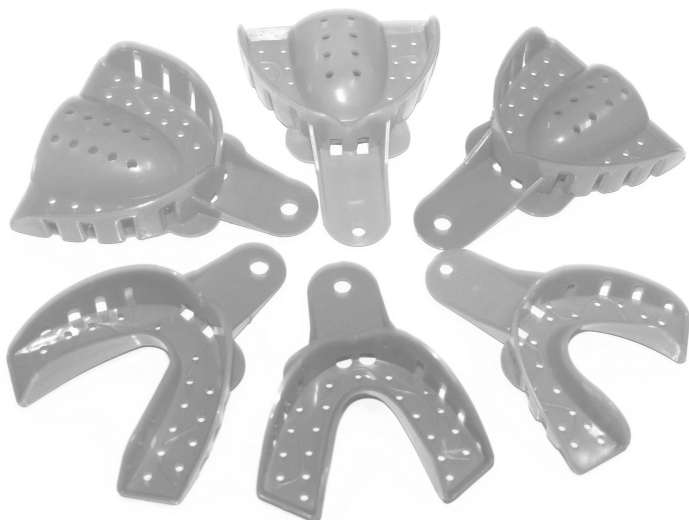

Pret:

84,94 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Set de 6 linguri termofomabile, foarte usor de folosit si foarte de ajutor in procesul de amprentare.

1. Verificati ca lingura este curata
2. Imersati lingura in apa fierbinte (70-80 C) si tineti-o 10-20 secunde
3. Inlaturati lingura, ajustati marimea si unghiul marginilor dorite cu mana, in functie de statusul dentar al pacientului. Cand pacientul are dinti asimetrice sau dinti deformati, marimea portiunilor din lingura corespunzatoare va fi ajustata ca sa permita amprentarea precisa si usoara.
4. Plasati lingura de amprenta ajustata in gura pacientului si verificati daca pacientul o simte confortabil sau nu. Daca pacientul nu simte confortabil lingura, repetati pasii 2 si 3 si reajustati lingura pana cand pacientul este confortabil tinand lingura de amprenta in gura.
5. Injectati material de amprenta in lingura ajustata si luati amprenta.

Prezentare

- set de 6 linguri termofomabile