



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gluko CHeX 2% Gel 5ml

Pret:

35,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Lichid pentru clatirea canalelor

Substanta activa: 2% gluconat de clorhexidina

Prezentare: seringă 5 ml, sub forma de gel

Gluconatul de Clorhexidina este folosit ca un preparat antibacterian pentru clatirea canalelor radiculare. Este mai eficient decat hipocloritul de sodiu in distrugerea microorganismelor ca E.faecalis care sunt de multe ori responsabile pentru tratamentul endodontic fara succes.

Aplicarea si proprietatile Gluko CheX 2%:

- Recomandat pentru clatirea canalelor afectate de inflamarea pulpei.
- Foarte recomandat pentru tratamentul endodontic reluat
- Foarte eficient contra Enterococcus Faecalis (bacterie imuna la NaOCl)
- Nu cauzeaza colorarea dintilor

Instructiuni pentru utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Introduceti Gluco CheX in canal utilizand seringa cu acul plasat in asa fel incat debitul sa fie directionat pe peretele canalului. Este recomandat a se folosi un ac cu taietura pe suprafata laterala de langa varf.

Atentie!!!

Nu clatiti direct cu solutie de NaOCl!!!

Atunci cand clatiti canalele radiculare, este obligatoriu sa le clatiti cu ser fiziologic intre aplicarea hipocloritului de sodiu si gluconatului de clorhexidina. Clatiti din belsug! Se previne astfel depunerea unui precipitat rezultat din amestecarea NaOCl si CheX.