

## Dezinfectant aspiratie Aspirmatic 2l



**Pret:**

**248,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Aspirmatic este un produs pentru dezinfectia curatarea si intretinerea zilnica a sistemului de aspiratie stomatologic si a scuipatoarei.

### **Avantaje:**

Actiune testata in studii practice pe unituri dentare ( exemplu : Sirona si KaVo )

Pentru toate tipurile de separatoare de amalgam

Fara efect spumant

Mod de utilizare economic

Manipulare facila

Asigura curatarea complexa si in siguranta din punct de vedere igienic a activitatilor de cabinet

Etichetare conforma prevederilor pentru produse periculoase



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

### **Instructiuni de utilizare:**

Se utilizeaza o data sau de doua ori pe zi, zilnic

Pentru cele mai bune rezultate se recomanda utilizarea sistemului de dozare Aspirmatic de doua ori pe zi, la sfarsitul fiecarei sesiuni clinice

Se pregateste solutia de utilizare prin adaugarea a 40ml de Aspirmatic in 1960ml de apa rece

Pentru a asigura ca solutia nu spumeaza la diluare se recomanda masurarea cantitatii corecte de apa calduta mai intai si apoi se toarna cantitatea corecta de Aspirmatic in apa

Se aspira 1.5l de solutie in tuburile de aspiratie si apoi se toarna restul de 0.5l in scuiptoare

Se lasa solutia sa actioneze timp de cel putin 30 de minute sau peste noapte

Dupa umezire se recomanda clatirea cu cel putin un litru de apa curata inainte de utilizarea sistemului de aspiratie

Produsul se dilueaza cu apa rece pentru a obtine concentratia pentru aplicare

### **Prezentare:**

Flacon 2 litri