



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sekusept Pb 2 kg Dezinfectant instrumente



Pret:

224,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Produs concentrat pulbere pentru instrumentar medical termorezistent și suprafețe de orice tip pe baza de acid peracetic

- Indicat pentru pentru curățarea și dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale (instrumentar medical din metal, plastic, cauciuc, sticlă, echipamente medicale, accesorii de anestezie, incubatoare nou-născuți); curățarea și dezinfectia căzilor medicinale – fizioterapie, a protezelor dentare; curățarea și dezinfectia suprafețelor mai inerte în sectorul medical (spitale, cabinete medicale, policlinici, laboratoare, secții de ATI, secții de neo-natologie etc.), în industria alimentară și de preparare a furajelor.
- Produsul nu se utilizează pentru dezinfectia instrumentarului nichelat sau din aluminiu și nici pentru endoscoape.
- Pentru dezinfectia instrumentarului se poate utiliza atât prin imersie cât și în băi cu ultrasunete.
- Tipul preparatului: Pulbere albă, miros slab

Dezinfectant de nivel mediu potrivit pentru pre-curatarea instrumentarului. Solutie activa 24-48h (recomandat 24h).

-
-



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Indicații de folosire și dozaj:

Sekusept Pulver Classic se folosește sub formă de soluție de lucru. Soluția de lucru se prepară cu apă rece de la robinet. Se adaugă cantitatea necesară de produs pulbere în apă și se amestecă de câteva ori într-un interval de 15 min., până la dizolvarea completă. Soluția este acum gata de a fi utilizată. Produsul se poate utiliza la toate gradele de duritate a apei.

Dezinfectia instrumentarului medical, aparatelor de anestezie, protezelor dentare: Imediat după utilizare, se introduc instrumentele medicale și garniturile de anestezie în soluția de lucru de concentrație recomandată. Instrumentele sau aparatele care se pot dezambla se desfac în elementele componente. Aveți grijă ca instrumentele să fie scufundate complet în soluția de lucru, evitând formarea de bule de aer. După timpul de acțiune recomandat, instrumentele se scot și se clătesc cu apă sterilă (în cazul dezinfectiei de nivel înalt) sau cu apă distilată (în cazul dezinfectiei de nivel scăzut).

Dezinfectia suprafetelor mari inerte, a căzilor de fizioterapie și a incubatoarelor pentru nou-născuți: Se prepară soluția de lucru de concentrația recomandată, se aplica prin stergere și se lasă să se usuce.

Dozaj

- Soluție de concentrație 0,5%: La 4 litri apă rece de la robinet se adaugă o lingură 20 gr. pulbere Sekusept Pulver Classic.
- Soluție de concentrație 1%: La 2 litri apă rece de la robinet se adaugă o lingură 20 gr. pulbere Sekusept Pulver Classic.
- Soluție de concentrație 1,5%: La 4 litri apă rece de la robinet se adaugă 3 linguri 20 gr. pulbere Sekusept Pulver Classic.
- Soluție de concentrație 2%: La 1 litru apă rece de la robinet se adaugă o lingură 20 gr. pulbere Sekusept Pulver Classic.

Prezentare

- Gălețușă plastic x 2 kg