

## Incidin Oxywipe servetele

Pret:

**71,56 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### Dezinfectant aparatura - servetele INCIDIN OXYWIPE - 100 buc

Detergent si dezinfectant, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen ( Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>)

Formula inovativa a Incidin OxyWipe ofera beneficiile unei solutii patentate pe baza de peroxid de hidrogen si a unui spectru larg de eficacitate.

Detergent si dezinfectant, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>)

Produsul are eficacitate impotriva unui spectru larg de bacterii si virusuri, fara a lasa reziduuri de substanta activa pe suprafata de actiune, datorita evaporarii foarte rapide

#### Incidin OxyWipe oferă:

Eficacitate: spectru larg de eficacitate, Timpi reduși de contact

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Sigur: Ingredientele active se descompun în apă și oxigen. Compatibilitate excelentă cu materialele.

Convenabil: Curată și dezinfectează într-o singură etapă

Ingrediente: 100g produs conține 1.0g peroxid de hidrogen.

Incidin OxyWipe S: Mod de folosire

Servetele se folosesc ca atare, prin stergerea aparaturii medicale, a suprafețelor, a dispozitivelor sau instrumentarului mic de dezinfectat (curățate în prealabil), cu umezirea completă a acestora, mobilier de spital, laborator, targi, brancarde, carucioare, canapele, mese de operații, obiecte sanitare, clante, aparatura medicală din salile de naștere, secții ATI, cabinete medicale, stetoscoape, termometre, instrumentar mic.

Nu necesită clătire, nu folosiți pe suprafețele sensibile la agenți oxidanți (cupru, alama, marmura)

## **CONFORMITATE CU STANDARDELE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR**

### **Pastrare și depozitare**

Produsul trebuie păstrat în recipientul original sub 25 grade C, într-o locație rece și uscată, ferită de lumina directă a soarelui. Perioada de valabilitate după prima deschidere: Incidin OxyWipe: 1 luna

## **INCADRARE PRODUS BIOCID**

Grupa: 1

Tip produs: 2

### **Prezentare:**

100 bucati