

Dezinfectant Biocid suprafete Sterisol



Pret:

42,53 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ai nevoie de o solutie care sa igienizeze perfect toate suprafetele de lucru? Nimic mai simplu! Iti prezentam Sterisol™, un produs de inalta calitate, destinat intrebuintarii de lunga durata in cabinetele medicale. Acesta curata si igienizeaza cu succes obiectele de inventar, instrumentarul si mediul ambiantal din incaperi. Se poate folosi pentru dezinfectarea echipamentelor, recipientelor si ustensilelor. Acest produs poate fi utilizat atat in domeniul medical, industrial, institutional, precum si in gospodarie.

Este o solutie cu actiune rapida, care nu contine alcool, aldehide sau fenoli. Are un spectru larg de actiune biocida si este ideal pentru orice tip de material.

Mod de utilizare:

- *Suprafete:* Se pulverizeaza direct pe zona care necesita curatare sau dezinfectare si se distribuie uniform solutia activa peste intreaga suprafata si obiectele care trebuiesc dezinfectate. Se lasa sa actioneze minim 5 minute. Nu necesita clatire.
- *Instrumentar:* Se curata instrumentarul de murdarie grosiera daca este cazul, apoi se imerseaza in solutie. Se

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
lasa sa actioneze conform timpilor de actiune recomandati in Fisa Tehnica, apoi se spala cu apa sterila.

- *Microaeroflora*: Se aplica solutia prin pulverizare sau nebulizare. Operatia de pulverizare sau nebulizare se face in absenta persoanelor din incaperi sau spatii inchise, urmata apoi de aerisire.

Substante active: Clorura de didecildimetilamoniu si saruri cuaternare de amoniu.

Tipul de produs biocid conform legislatiei in vigoare (Regulamentul UE nr. 528/2012):

Grupa principală 1: Dezinfectante si produse biocide

Tip de produs: 2 – Dezinfectant pentru suprafete, instrumentar si aeromicroflora cu aplicare prin stergere, imersie, pulverizare sau nebulizare (ceata rece) in domeniul medical, industrial, institutional, colectivitati, casnic.

Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populatie

Attentionari: A se folosi numai dupa ce au fost citite si intelese instructiunile de utilizare. Este recomandata depozitarea in spatii inchise, curate, bine aerisite, cu temperaturi cuprinse intre + 5 °C la + 30°C. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv declaratia de conformitate intocmita pe baza fiselor tehnice, a buletinelor de analiza si avizul sanitar.

Denumirea chimica	Nr. CE	Nr. CAS	Cor
Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	
Compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchil-dimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	
Aplicare	Dozaj	Timp de actiune	
prin stergere	nediluat	5 min – dezinfectie de nivel 60 min - dezinfectie de nivel	
prin imersie	nediluat	5 min – dezinfectie de nivel 60 min - dezinfectie de nivel	
prin nebulizare	nediluat, 10 ml/m ³	5 min – dezinfectie de nivel 60 min - dezinfectie de nivel	

Pentru dezinfectia suprafetelor stergeti cu o laveta inmuata in solutie dezinfectanta sau pulverizati solutia dezinfectanta peste suprafata contaminata si apoi stergeti cu o laveta umeda.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pentru dezinfectia instrumentarului medical se imerseaza instrumentarul in solutie si, dupa timpul de actiune recomandat, se spala cu apa sterila.

Pentru dezinfectia pe cale aeriana se aplica solutia dezinfectanta prin pulverizare sau nebulizare (ceata rece) in focare epidemiologice, inainte de instituirea masurilor de curatare sau curatenie.

Modalitati de ambalare: 1000 ml cu pulverizator