

Dezinfectant Biocid de suprafete Klintensiv 5 L

Pret:

171,15 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Iti doresti un cabinet sigur, fara microbi? Iti oferim acum dezinfectantul pentru suprafete gata de utilizare. Cu acest nou dezinfectant, puteti igieniza scaunele de tratament, suprafetele uniturilor dentare, piesele de mana (turbina, contraunghi, piesa dreapta), bratele de sustinere a lampilor, instrumentele stomatologice din otel, aluminiu, cupru, silicon sau cauciuc, dar si alte suprafete de lucru din spatii private sau zone de sanatate publica. Este o solutie cu proprietati dezinfectante, fara alcool, fara aldehide, cu un spectru larg de actiune biocida. Substantele active sunt sarurile cuaternare de amoniu. Recomandam acest produs pentru suprafete delicate si opacizante, sensibile la atacul chimic al solutiilor cu baza alcoolica. A fost creat conform reglementarilor europene privind dezinfectia.

Mod de utilizare: Se pulverizeaza direct pe zona care necesita curatare sau dezinfectare si se distribuie uniform solutia activa peste intreaga suprafata si obiectele care trebuiesc dezinfectate (se poate utiliza o bucata de material textil netesut). Se lasa sa actioneze minim 5 minute. Nu necesita clatire.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Substante active: Clorura de didecildimetilamoniu si saruri cuaternare de amoniu.

Tipul de produs biocid conform legislatiei in vigoare (Regulamentul UE nr. 528/2012):

Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide

Tip de produs: 2 – Dezinfectant pentru suprafețe, instrumentar și aeromicroflora cu aplicare prin ștergere, imersie, pulverizare sau nebulizare (ceață rece) în domeniul medical, industrial, instituțional, colectivități, casnic.

Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație

Attentionari: A se folosi numai dupa ce au fost citite si intelese instructiunile de utilizare. Este recomandata depozitarea in spatii inchise, curate, bine aerisite, cu temperaturi cuprinse intre + 5 °C la + 30°C. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv declaratia de conformitate intocmita pe baza fiselor tehnice, a buletinelor de analiza si avizul sanitar.

Denumirea chimica	Nr. CE	Nr. CAS	Co
Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	
Compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchil-dimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	

Stergeti suprafata infectata cu o laveta inmuata in solutie dezinfectanta sau pulverizati solutia dezinfectanta peste suprafata contaminata si apoi stergeti cu o laveta umeda.

Tip dezinfectie	Dozaj solutie
Nivel mediu si scazut	nediluat
Nivel inalt	nediluat



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Modalitati de ambalare: Bidon 5 litri