

Dezinfectant microaeroflora Desogen AERO 5L

Pret:

358,86 lei TVA inclusa



Descriere produs:

DESOGEN AERO® este un dezinfectant de nivel inalt multifuncțional destinat curățării, decontaminării și dezinfectării suprafețelor ne-poroase, și instrumentelor non-critice în spitale, laboratoare și alte zone critice în care controlul contaminării încrucișate între suprafețele tratate este important. Este o soluție cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecția.

Proprietăți:

- dezinfectant pentru suprafețe, instrumentar medical, aeromicrofloră și pentru tratarea apei.
- dezinfectant pentru dezinfecția terminală a aeromicroflorei (suprafețe și volume) pe cale aeriană prin nebulizare sau pulverizare (ceață rece).
- nu necesită clătire, nu decolorează și nu pătează suprafețele.
- nu conține aldehide, clor, alcool, fenoli, săruri cuaternare de amoniu.
- biodegradabil (99,9%).

DESOGEN AERO® se utilizează astfel:

Dezinfectant de nivel scăzut – cu concentrații ale soluției de lucru de 2,50 - 20 % cu timp de acțiune de 5-15 minute;

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant de nivel mediu (intermediar) – cu concentrații ale soluției de lucru de 20 - 50 % cu timp de acțiune de 5-15 minute;

Dezinfectant de nivel înalt – cu concentrații ale soluției de lucru de 50 - 100 % cu timp de acțiune de 5-30 minute;

DESOGEN AERO® se utilizează ca dezinfectant al aeromicroflorei, suprafețelor de orice tip, instalații din industria alimentară și a instrumentarului medical în diluție de 2,50 - 100%, astfel:

a. populație/ uz casnic - diluție în apă 2,5-15%;

b. profesional/ industrial – diluție în apă 50-100%;

DESOGEN AERO® se va aplica întotdeauna după efectuarea curățeniei !

Eficient	Eficacitate biocida mare.
Economic	Dezinfectant de nivel înalt multifuncțional.
Inovativ	Dezinfectie de înaltă calitate pentru microaeroflora.
Non-iritant	Nu conține iod, fenoli, aldehide sau clor.

Utilizare:

- Dezinfectarea aeromicroflorei prin nebulizare/pulverizare
- Dezinfectarea instalațiilor sanitare (vase de toaletă, chiuvete, etc) prin turnare;
- Dezinfectarea suprafețelor dure prin pulverizare;
- Dezinfectarea suprafețelor dure prin stergere cu laveta sau mopul, sau prin spălare;
- Dezinfectarea echipamentelor și a instrumentelor prin imersare/scufundare/inmuire;

Forma de condiționare: lichid concentrat TP2 – dezinfectant pentru domeniul medical (spitale, policlinici, cabinete etc).

Compoziția la 100 g produs:

- 5 g Peroxid de hidrogen (CAS: 7722-84-1; EC: 201-186-8)

Produsul DESOGEN AERO® prezintă:

- activitate bactericidă: SR EN 1276 , SR EN 1040, SR EN 13727+A1, SR EN 1656, SR EN 14349, SR EN 14561;

- activitate fungicidă, levuricidă: SR EN 13624, SR EN 14562 , SR EN 1650+A1, SR EN 1657, SR EN 1275;

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- activitate micobacterică, (inclusiv tuberculoasă): SR EN 14348

- activitate virucidă, (inclusiv HIV): SR EN 14476+A1;

- activitate sporicidă: SR EN 14347, SR EN 13704.

INSTRUCTIUNI DE DOZARE PENTRU NEBULIZATOARE:

norma de consum de cca. 6 ml. / m.c. al incintei ce urmeaza a fi nebulizata.

Concentratie: 50%-100%

De exemplu: incinta 20 mp x 2.5 m inaltime = 50 mc.

Nebulizare: 300 ml lichid (concentratie 50%-100%) -> 150 ml dezinfectant si 150 ml apa

Viteza nebulizator: 30 ml/min

Timp nebulizare: 10 minute

Timp de actiune, dupa nebulizare: Pentru actiunea Virucida (medicina umana) faza2/etapa1

In conditii de curatenie; temperatura 20°C

Concentratie 50%: 15 minute

Dupa nebulizare, aerisiti incaperea!

Timp de actiune, dupa nebulizare:

Pentru actiunea Virucida (medicina umana) faza2/etapa1 conform EN 14476:2013+A1:2015

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
In conditii de curățenie; temperatura 20°C

Poliovirus Adenovirus Vaccinia virus BVDV (inclusiv HIV, HBV;HCV)

Concentratie 50%: 15 minute

Pentru celelalte actiuni (bactericida, fungicida, etc): Cititi cu atentie Fisa tehnica de Produs

Compatibilitate: produsul este compatibil cu materiale ca: ciment, mozaic, linoleum, gresie, lemn lustruit, faianta sau vopsea de ulei, ceramica, portelan, sticlărie de laborator, plexiglas sau acrilice, cauciuc, metal, fibra optica, etc. Produsul diluat utilizat la concentratiile recomandate nu este coroziv .

Datorită caracteristicilor produsului , nu se recomandă reutilizarea sau păstrarea soluțiilor de lucru (diluțiilor) în vederea refolosirii ! Produsul nu se va amesteca cu alte dezinfectante!

Prezentare

- Bidon 5 litri