

Infiltrant ICON Vestibular



Pret:

438,40 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Freza? Nu, multumesc!

Prioritatea Icon: Conservarea tesuturilor dentare integre

Cu noul Infiltrant Icon de la DMG, intrati intr-o noua era a tratamentului stomatologic.

Acum aveti sansa de a trata si elimina cariile incipiente folosind o tehnica nemaiintalnita pana acum, care ii va incanta cu siguranta pe pacientii dumneavoastra. Aceasta tehnica elimina nevoia de a utiliza frezele, nu provoaca durere si nu distruge tesuturile sanatoase ale dintilor. Utilizati acest produs si oferiti-le pacientilor dumneavoastra un tratament micro-invaziv.

Problema: cariile incipiente!

Metodele de tratament de pana acum nu pot oferi solutii multumitoare:

- Tratamentul prin fluorizare?

Nu este intotdeauna eficient in tratarea cariilor in stadii avansate.

- Obturarea?

Soluția revoluționară: Icon de la DMG

- Creat în colaborare cu Universitatea Charite din Berlin și cu Universitatea din Kiel
- Testat "in vitro" și "in vivo"
- Cu Icon puteți elimina cariile incipiente fără a folosi frezele și fără a distruge porțiuni de țesut dentar sănătos
- O noutate o reprezintă și aplicatorul interproximal, care asigură extrudarea cu ușurință și în mod uniform a materialului în spațiul interdental, greu de accesat altfel.

Prima etapă a metodei infiltrării cariei este gravarea acida a suprafeței acesteia cu un gel cu HCl. Apoi, după curățarea și uscarea leziunii carioase, infiltrantul penetrează porii cariei, capacitate datorată proprietăților fizico-chimice speciale ale infiltrantului. Această nouă metodă permite un tratament al cariilor incipiente ce nu necesită prepararea cavității cu instrumente rotative convenționale (freze), astfel ca se conservă în întregime țesuturile adiacente leziunii carioase.

Avantaje extraordinare pentru medici și pentru pacienți

- Se stopează evoluția leziunii carioase
- Se conservă zonele neafectate ale dintelui
- Suprafața are aspectul smaltului sănătos. Această metodă poate fi utilizată și pentru a trata "petele albe" cariogene rezultate după îndepărtarea bracket-urilor.
- Se asigură prelungirea duratei de viață a dintelui
- Tehnica elimină durerea (fără a utiliza vreun anestezic) și anxietatea pacienților față de turbina, iar frezele devin inutile
- Tratament simplu, în cadrul unei singure consultații
- Datorită proprietăților micro-invazive, poate fi utilizat cu succes în pedodontie

[Mai multe informații despre acest produs găsiți aici](#)

Varianta ICON Vestibular

- 1 seringă - 0.3 ml Icon-Etch
- 1 seringă - 0.45 ml Icon-Dry
- 1 seringă - 0.45 ml Icon-Infiltrant
- 6 aplicatoare interproximale sau vestibulare
- 1 aplicator Luerlock
- 4 pene dentare

O trusă este suficientă pentru tratarea a două leziuni carioase incipiente