

Impregum Soft Heavy Body



Pret:

439,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Impregum™ Soft – material de amprenta polieter pentru amestecare manuala care ofera toate beneficiile noii generatii de polieteri: acuratete deosebita, hidrofilie initiala excelenta, gust placut, rigiditate optima care permite indepartarea amprentei cu usurinta din cavitatea orala a pacientului si demularea usoara a modelelor. Impregum™ Soft este disponibil in trei consistente:

- Fluida
- Medie
- Vascoasa

Este indicat pentru tehnica de amprentare cu doua vascozitati, intr-un singur timp, utilizand un material cu consistenta vascoasa si fluida.

Materialul de amprenta Impregum™ stabileste standardele in ceea ce priveste acuratetea materialelor de amprenta

Caracteristici si beneficii

Hidrofilie Initiala

- Permite reproducerea perfecta a detaliilor chiar intr-un mediu umed
- Excelent pentru amprentarea zonelor subgingivale

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Tixotropic cu priza brusca

- Curge sub presiune, dar ramane vascos in lingura si in jurul preparatiei dupa incetarea presiunii.
- Caracteristica de a se intari brusc da timp suficient medicului pentru a pozitiona lingura, dupa care priza se face rapid ... in cateva secunde. Acest lucru reduce dramatic riscul aparitiei posibilelor distorsiuni.

Indicatii

Amprente de mare precizie pentru:

- Coroane si punti
- Inlay-uri/Onlay-uri
- **Implante**
- Amprente functionale

Tehnica de lucru

- Aplicati lungimi egale de pasta baza si catalizator pe pad-ul de amestecare. Folositi o spatula metalica rigida. Amestecarea prin intinderea materialului si ridicarea spatulei conduce la obtinerea unui amestec foarte omogen, fara bule de aer. Repetati procedura pana cand amestecul este omogen si are aceeasi culoare, dar nu mai mult de 45 secunde.
- Umpleti prima data seringa cu ajutorul dispozitivului de umplere si aplicati materialul in jurul preparatiei.
- Umpleti lingura de amprenta si inserati-o in gura pacientului. Dezinfectati amprenta conform instructiunilor.

Prezentare

Impregum Soft Heavy Body 31749 (pt. amestecare manuala) consistenta ridicata

- 2 x 120 ml pasta de baza
- 2 x 15 ml pasta catalizator
- Pad de amestecare