



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Infiltrant ICON Proximal

Pret:

**435,40 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

**Freza? Nu, multumesc!**

Prioritatea Icon: Conservarea tesuturilor dentare integre

Cu noul Infiltrant Icon de la DMG, intrati intr-o noua era a tratamentului stomatologic. Acum aveti sansa de a trata si elimina cariile incipiente folosind o tehnica nemaiintalnita pana acum, care ii va incanta cu siguranta pe pacientii dumneavostra. Aceasta tehnica elimina nevoia de a utiliza frezele, nu provoaca durere si nu distrugе tesuturile sanatoase ale dintilor. Utilizati acest produs si oferiti-le pacientilor dumneavostra un tratament micro-invaziv.

Problema: cariile incipiente!

Metodele de tratament de pana acum nu pot oferi solutii multumitoare:

- Tratamentul prin fluorizare?  
Nu este intotdeauna eficient in tratarea cariilor in stadii avansate.
- Obturarea?



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Sacrifica portiuni serioase de tesut dentar sanatos.

Solutia revolutionara: Icon de la DMG

- Creat in colaborare cu Universitatea Charite din Berlin si cu Universitatea din Kiel
- Testat "in vitro" si "in vivo"
- Cu Icon puteti elimina cariile incipiente fara a folosi frezele si fara a distrugere portiuni de tesut dentar sanatos
- O nouitate o reprezinta si aplicatorul interproximal, care asigura extrudarea cu usurinta si in mod uniform a materialului in spatiul interdental, greu de accesat altfel.

Prima etapa a metodei infiltrarii cariei este gravarea acida a suprafetei acesteia cu un gel cu HCl. Apoi, dupa curatarea si uscarea leziunii carioase, infiltrantul penetreaza porii cariei, capacitate datorata proprietatilor fizico-chimice speciale ale infiltrantului. Aceasta noua metoda permite un tratament al cariilor incipiente ce nu necesita prepararea cavitatii cu instrumente rotative conventionale (freze), astfel ca se conserva in intregime tesuturile adiacente leziunii carioase.

Avantaje extraordinare pentru medici si pentru pacienti

- Se stopeaza evolutia leziunii carioase
- Se conserva zonele neafectate ale dintelui
- Suprafata are aspectul smaltului sanatos. Aceasta metoda poate fi utilizata si pentru a trata "petele albe" cariogene rezultante dupa indepartarea bracket-urilor.
- Se asigura prelungirea duratei de viata a dintelui
- Tehnica elimina durerea (fara a utiliza vreun anestezic) si anxietatea pacientilor fata de turbina, iar frezele devin inutile
- Tratament simplu, in cadrul unei singure consultatii
- Datorita proprietatilor micro-invazive, poate fi utilizat cu succes in pedodontie

Mai multe informatii despre acest produs gasiti aici

Variantă ICON Proximal

1 seringa - 0.3 ml Icon-Etch

1 seringa - 0.45 ml Icon-Dry

1 seringa - 0.45 ml Icon-Infiltrant

6 aplicatoare interproximale sau vestibulare

1 aplicator Luerlock

4 pene dentare

O trusa este suficienta pentru tratarea a doua leziuni carioase incipiente