


Endo-Prep Crema 2 ml

Pret:

29,27 lei TVA inclusa

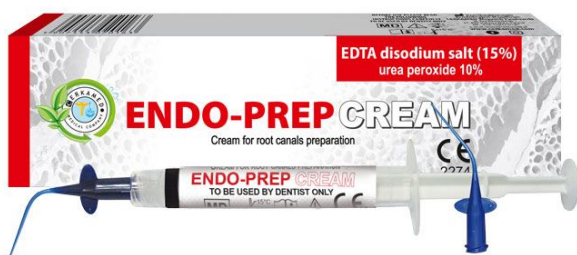

Descriere produs:

Endo Prep Cream se foloseste pe durata curatarii si largirii canalului radicular. Endo Prep Cream contine EDTA, care ajuta la inmuirea canalelor calcificate si inlatura detritusul dentinar, usurand curatarea si formarea canalelor.

Cand se utilizeaza impreuna cu hipocloritul de sodiu, actioneaza ca inalbitor al dintelui decolorat datorita necrozei tesutului.

Produsul contine peroxid de uree, care impreuna cu hipocloritul de sodiu, elibereaza oxigen activ, producand un efect de barbotare, care aduce debrisul la suprafata.

Propilenglicolul face ca introducerea instrumentului rotativ in canalul radicular sa fie usoara si minimizeaza riscul ruperii acestuia in canal.

Endo Prep Cream ajuta la albirea dintelui, daca s-a produs decolorarea datorita necrozei tesutului.

Instructiuni de utilizare:

- Izolati dintele tratat cu diga.
Umpleti cavitatea dintelui cu preparatul Endo Prep Cream, sau aplicati direct pe instrumentul rotativ.
Prepararea mecanica a canalului va fi finalizata prin clatirea cu solutie de hipoclorit de sodiu.

Prezentare

- seringă 2 ml



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273