

## Aspirmatic Cleaner 2L



**Pret:**

**232,01 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Aspirmatic Cleaner utilizat pentru curatarea speciala saptamanala a sistemului de aspiratie scuiatoare si tevilor de scurgere.

### **Avantaje:**

Actiune testata in studii practice pe unituri dentare ( exemplu : Sirona si KaVo )

Pentru toate tipurile de separatoare de amalgam

Fara efect spumant

Mod de utilizare economic

Manipulare facila

Asigura curatarea complexa si in siguranta din punct de vedere igienic a activitatilor de cabinet

Etichetare conforma prevederilor pentru produse periculoase

## **Instructiuni de utilizare:**

In timpul utilizarii de rutina a unitatii de aspiratie, pot aparea depuneri de substante organice si anorganice, acestea uscandu-se nn tubulatura, provocand contaminarea si prezentand riscuri de infectie pentru personal atunci cand se schimba filtrul

Pentru a evita probleme mecanice la sistemul de aspiratie si, in acelasi timp, pentru a asigura siguranta igienica, Aspirmatic Cleaner trebuie utilizat după cum urmeaza: in concentratie de 5% o data sau de doua ori pe saptamana in loc de dezinfectarea de dupa-amiaza pentru curatarea speciala

Se prepara 2l de solutie gata de utilizare sistemul aspirmatic pentru fiecare unitate de tratament

Pentru aceasta se amesteca 1900ml de apa cu 100ml de concentrat

Se aspira 1.5l in tuburile de aspiratie si se toarna restul de 0.5l in scuipatoare

Se lasa sa actioneze timp de circa 1 - 2 ore (de exemplu, in timpul pauzei de pranz, astfel incat impuritatile existente sa fie slabite

Dupa trecerea timpului de contact, se aspira apa pentru a indeparta impuritatile din tuburi

In cazul prezentei unor impuritati persistente sau daca contaminarea a avut efect perioade mai lungi de timp, se recomanda utilizarea Aspirmatic Cleaner in concentratie de 10% (1800 ml apa si 200ml concentrat)

## **Important: Aspirmatic Cleaner nu trebuie lasat aplicat peste noapte sau peste weekend**

Sistemul aspirmatic permite amestecarea usoara si sigura, urmata de turnarea ulterioara a solutiei

Tuburile de aspiratie pot fi plasate cu usurinta in adaptor

In cazul prezentei unor contaminari persistente cu reziduuri sanguine, trebuie aspirata apa imediat dupa tratament

Se calculeaza concentratia potrivita pentru solutia gata de utilizare, utilizand calculatorul de dozare DosageCal (disponibil pe siteul producatorului)

## **Prezentare:**

Flacon 2l



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273