



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pupinel Tau Steril 2000 17l

Pret:

1.848,60 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Tau Steril 2000 este un sterilizator cu aer uscat, cu o capacitate de 17 litri, destinat sterilizarii instrumentarului din cabinetele medicale, stomatologice si pentru saloanele de infrumusetare, cosmetica.

Aparatul este compus:

- dintr-o camera incalzita la 200°C,
- trei rafturi perforate pentru instrumentar,
- maner pentru rafturi,
- termostat,
- termometru si
- lumini pentru controlul functionarii.

Obiecte sterilizabile:

- instrumentar din otel inoxidabil,
- instrumentar din otel (aliaj Fe-C),
- alte instrumente metalice in general,
- instrumentar din sticla.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Nu se vor introduce in aparat:

- obiecte fabricate din hartie,
- textile, cauciuc si plastic termolabil,
- sau alte materiale cu temperatura de topire (punct de ardere) scazuta, pentru ca acestea vor fi distruse si pot reprezenta o posibila sursa de pericol.

Daca totusi produse de acest tip necesita tratament, recomandam verificarea cu multa atentie a rezistentei acestora la caldura.

In functie de tipul materialului pentru sterilizat, odata ce s-a atins temperatura programata, timpul poate varia intre 15-20 minute pana la maxim 45-60 minute la 180°C.

Se recomanda sa nu se depaseasca temperatura de 180°C pentru a preveni deteriorarea instrumentelor.

- Temperatura de lucru: reglabila de la 90° la 200°C
- Timp de sterilizare: reglabil de la 0 la 120 minute
- Dimensiuni incinta: 37,5 cm x 23 cm x 20 cm (lungime x inaltime x adancime)
- Tensiunea de alimentare: 220V - 50Hz
- Greutate: 13 Kg
- Dimensiunea exterioara: 44 cm x 38 cm x 31 cm
- Puterea: 620 W
- Tensiunea: 230V – 50Hz.

Conditii de lucru in mediu:

- Temperatura: 5° C -40° C;
- Umiditatea (la max. 31° C): 80%
- Umiditatea (la max 40° C): 50%

Intervalele de timp si temperatura recomandate:

Temperaturile care pot fi programate depinzand de caracteristicile specifice impuse de catre producator si/sau instrumetul care trebuie sterilizat.

Temperaturile recomandate pentru sterilizare uscata: 150° C-180° C.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Temperatura maxima programabila: 200° C.

Timpii de sterilizare recomandati: 30 - 45 - 60 min.

Timpul maxim de programare: 120 min.

IMPORTANT:

Personalul care foloseste sterilizatorul trebuie sa respecte neaparat temperaturile mai sus metionate.

Echipamentul este fabricat in concordanta cu regulile si standardele europene.