



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Banda fibra de sticla pentru imobilizare Interlig

**Pret:**

**169,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Banda impletita din fibre de sticla impregnata cu compozit fotopolimerizabil pentru realizarea splinturilor.

### Date tehnice

- Culoare : translucet
- Dimensiuni : 8.5 cm lungime, 2.0mm latime,2.0mm grosime.
- Continut de fibre ( greutate ) : 60%
- Impregnare cu rasina : 40%
- Rezistenta la incovoiere : 282 MPa ( ISO 10477 )
- Pre-impregnata cu rasina compozita fotopolimerizabila.
- Manipulare si taiere: Interlig nu necesita instrumente special pentru taiere.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

#### Indicatii

- Imobilizare in paradontoze
- Imobilizarea dintilor traumatizati
- Fabricarea protezelor temporare
- Ranforsare in restaurari

#### Prezentare

3 bucati (8.5 cm fiecare )

#### Modalitate de utilizare

#### Caz initial:

Izolare cu folie de diga si aplicarea penelor de lemn.

Aplicarea penelor de lemn evita raspindirea rasinei prin spatile interproximale .

Un sant lingual este optional ,dar indicat pentru splituri de lunga durata.

Delimitarea santului lingual Santul lingual este gata

Aplicati acidul fosforic Aplicare adeziv



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Lungimea exacta dupa masurare si taiere Aplicati fibra Interlig

Fotopolimerizare

Acoperiti fibra cu compozit fluid.

Finisare si polisare.

Procedura de finisare este asemenea cu cea utilizata pentru restaurarile de compozit.