


Sare pentru curatare incinte 150g

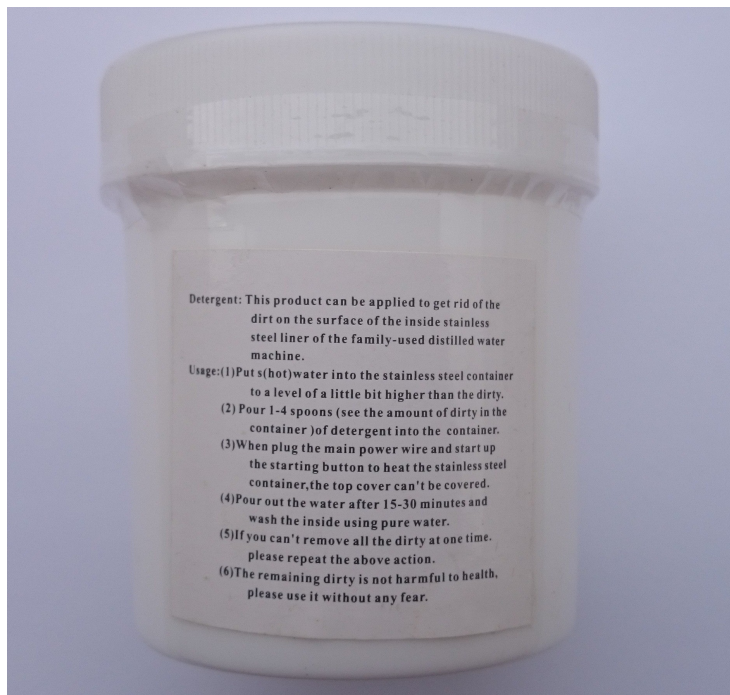

Pret:

43,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- Sare pentru curatarea incintelor distilatorului sau autoclavului de reziduurile de saruri/calciu lasate de apa dura.

Mod de utilizare

- Turnati apa fierbinte in camera de inox pana la un nivel putin mai ridicat decat suprafata afectata
- Turnati 1-4 linguri (in functie de cantitatea de reziduuri depusa) in apa
- Porniti aparatul pentru a porni incalzirea camerei de inox insa nu acoperiti/inchideti camera de otel
- Aruncati apa dupa 15-30 de minute si spalati interiorul camerei de otel cu apa curata
- Daca nu s-a putut inlatura murdaria din prima operatiune, repetati toti pasii
- Reziduurile de substanta de curatare nu sunt periculoare pentru sanatate.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- Compozitie: acid citric monohidrat
- Contine 150 g