

## Kit matrici dr. Walser 10 buc + pensa



**Pret:**

**1.479,01 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Matricile Walser se caracterizeaza printr-o adaptabilitate optima datorita aplicarii dintr-o singura miscare. Matricile Walser necesita rareori fixarea lor cu pene deoarece acestea se fixeaza foarte bine pe dinte, fiind foarte subtiri (doar 0,05 mm). Pacientul poate chiar musca atunci cand matricea este fixata pe dinte.

### **Avantaje:**

- se fixeaza si se scoate in cateva secunde
- o obturatie optima intr-un timp f.scurt si dintr-o singura miscare
- fixeaza sigur si solid ca un corset
- se adapteaza automat la forma conica a dintilor
- pacientul poate inchide gura si musca
- fara insurubare si strangere
- suportul ideal pentru rulouri
- sterilizare simpla si utilizare indelungata
- foarte subtiri, numai 0,05 mm

### **Forme si zone de aplicare**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

#### **Forma X**

- Obturatii pe doua suprafete interdentare

#### **Forma O (circulara)**

Video aplicare forma O

- Obturatii MOD
- Obturatii pe dinti individuali

## Aplicarea si inlaturarea matricilor WALSER

### Forma X

#### Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.



Inserati matricea in spatiul intrdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.



## Inlaturarea matricii

Retensionati matricea in punctul maxim. Acest pas este important pentru a nu deteriora obturatia bine conturata. Inainte de a o inlatura, matricea trebuie deplasata cu o miscare usoara de balansare in jurul axei sagitale, in acest fel benzile se vor indeparta mai usor de materialul de obturatie.



## Forma O

## Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



Inserati matricea in spatiul interdental. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Matricea WALSER este aplicata imediat si este fixata strans si sigura ca un corset.



Inlaturare: similar ca la forma X

## Forme

No.	Forma	Caracteristici speciale	Inaltimea benzii	Aplicabilitate
	1X	potrivit si pentru molari lapte	de 5,0 mm	BICUS
	2X		6,5 mm	BICUS
	3X		5,0 mm	MOLAR
	4X		6,5 mm	MOLAR
	50	potrivit si pentru molari lapte	de 5,0 mm	BICUS SMALL
	60		6,5 mm	BICUS SMALL
6c NEW	O	o parte a benzii cu 3 mm mai lunga	5/8 mm	BICUS
	70	potrivit si pentru molari lapte	de 5,0 mm	BICUS
	80		6,5 mm	BICUS

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

90	5,0 mm	MOLAR
100	6,5 mm	MOLAR
10c NEW O	o parte a benzii cu 3 mm5/8 mm mai lunga	MOLAR
11XF	banda are o despicatura la6,5 mm capat	11, 12, 21, 22
12XF	8,0 mm	11, 12, 21, 22
	14 X 6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
	15 O	
13X	benzi metalice extra scurte/5,0 m potrivit si pentru molari de lapte	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
14X	benzi metalice extra scurte 6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
15O	5,0 mm	31, 32, 41, 42
16O	6,5 mm	31, 32, 41, 42
17X	benzi metalice extra inalte 8,0 mm	4-5
18X	8,0 mm	6-8
19O	8,0 mm 4 - 5	8-Jun
	20 O	
21OF	banda are o despicatura8,0 mm spre capat	11, 21
22OF	8,0 mm	12, 22
23ON	benzi metalice mai lungi,5,0 mm intindere a lor mai mare	6-8
24ON	se ataseaza peste clema de 6,5 mm diga	5 - 9
25O	marime medie 5,0 mm (Forma speciala pentru molarii de lapte; deasemenea foarte potrivite nr.. 1, 5, 7, 13)	Molar de minte V



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

**Prezentare**

Kitul contine 10 matrici, de la nr 1 la nr 10 (fara 6c si 10c) astfel avand 4 matrici cu forma X si 6 matrici cu forma O cu doua inaltime ale benzii. Matricile sunt montate pe un suport autoclavabil si indeplinesc toate cerintele care ar putea aparea in zona de molari si premolari. Include deasemenea si o pensa pentru plasarea matricilor.