



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Canal Clean

Pret:

37,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Solutie pentru indepartarea obturatiilor provizorii de canal, inclusiv cele continand iodoform.

Substante active:

- alcool izopropilic 40%
- acetona 40%

Aplicare

Pentru a usca canalul radicular:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- preparati mecanic canalul radicular
- cand ati terminat preparatie, aplicati Canal Clean cu un ac endodontic si apoi uscati cu conuri de hartie

Pentru a indeparta preparatii care contin iodoform:

- aplicati substanta pe canalul obturat
- indepartati preparatia continuand iodoform, daca este nevoie repetati adaugarea de Canal Clean

Canal Clean este destinat a fi folosit pentru curatirea canalelor radiculare. Accelereaza uscarea canalelor radiculare inainte de obturatie.

Alcoolul izopropilic continut in produs este higroscopic, usuca peretii canalului intr-un timp foarte scurt, deasemenea reduce tensiunea superficiala fiindca lichidul patrunde chiar si in tubulii cei mai mici.

Celelalte componente ale produsului, acetona si acetatul de etil degreseaza suprafata. Toate substantele folosite sunt caracterizate de un timp foarte scurt de evaporare, astfel degresarea si uscarea canalului sunt posibile intr-un timp foarte scurt, de cateva secunde.

Canal Clean este recomandat, deasemenea, sa fie folosit ca ultim agent de clatire a canalului.

Sticla cu adaptor

Cerkamed a introdus prima sticla cu adaptor, care face usoara transvazarea preparatului din sticla in seringă. Tot ce trebuie sa faceti este sa insurubati capatul seringii in adaptorul de pe sticla, sa intoarceti sticla si sa aspirati continutul. Cu acest adaptor puteti folosi orice seringi de pe piata, fie ca sunt luer sau luer-lock.

Prezentare

- flacon 45 ml
- adaptor
- dispenser



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- aplicator