



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pene interdentare elastice

Pret:

30,78 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Penele elastice TDV sunt indicate pentru uzul general in procedurile restaurative, fiind compatibile cu toate sistemele de matrice. Au functia mecanica de adaptare a matricei si/sau de separare a dintelui adiacent, actionand in acelasi timp pe fetele linguala si vestibulara. Penele sunt produse in 3 culori diferite, aplicabile in functie de inaltimea cervico-ocluzala a spatiului proximal.

3,2 mm - albastre - pentru cavitati putin adanci

2,6 mm - galbene - pentru cavitati medii

2,0 mm - verzi - pentru cavitati adanci

Folosire



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dupa instalarea matricii, selectati pana corecta pentru folosirea in procedura.

1. Plasati pana in cleste prin intermediul celor doua gauri mai mari
2. Largiti pana pana cand partea sa centrala ajunge la grosimea suficienta pentru a putea fi introdusa intre dinti
3. Pozitionati pana in spatiul interdentar si dati drumul la cleste.
4. Cand procedura s-a terminat, trageți de pana de una dintre extremitati si taiati-o din partea centrala. Dupa aceea, eliminati ambele parti din gura pacientului.

Compozitie

- cauciuc si coloranti netoxici

Prezentare

- 25 de bucati, asortate