

Ace preparare mecanica S5 Big Apical



Pret:

98,53 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sistem S5 Big Apical pentru preparatia mecanica a canalului radicular.

Pentru cele mai bune rezultate clinice, largiti cu usurinta sectiunea apicala a canalului radicular folosind sistemul S5 Big Apical. Este cel mai convenabil de folosit complementar sistemului rotativ S5.

Ghid de folosire

1. Aplicati diga si preparat accesul la cavitate pentru canalele relevante.
2. Irigati cu hipoclorit de sodiu.
3. Localizati canalele folosind ace manuale, marimea ISO 10 sau 15.
4. Stabiliti marimea de lucru si preparati apical canalul cu marimea nr. 3 folosind instrumentarul rotativ S5.
5. Daca este necesara folosirea de diametre apicale mai mari, folositi acele S5 Big Apical ISO 35-50 dupa



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
necesitate.

Prezentare

- cutie cu 4 ace
- marime: asortate 35-50
- marimea partii active: 23 mm
- marimea partii pasive (trunchi) : 13 mm