

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

MTA+ Cerkamed 3 x 0,14 g + 1 ml

Pret:

102,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material pentru obturarea si reconstructia canalelor radiculare.

Substante active:

- Hidroxid de calciu si silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu.

Setul contine:

- 3 x 0,14g MTA+
- 1 ml lichid

MTA+ este indicat in mod special pentru folosirea in urmatoarele cazuri:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- mineralizarea leziunilor canalului radicular
- obturarea retrograda a apexului
- cofaj direct
- amputatie pulpara
- in tratamentul dintilor cu dezvoltare radiculara incompleta

Remineralizeaza tesuturile dure si obtureaza ferm canalul radicular.

Instructiuni de folosire:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cum sa lucrati cu MTA+

1. Puneti pe o placuta de sticla sau un pad de mixare continutul unei sticlute de pudra MTA+ si 1-2 picaturi din lichidul MTA+ dozat cu pipeta (poza 1-3)

2. Amestecati-le 30 de secunde pana obtineti consistenta nisipului umed (poza 4). Daca consistenta amestecului este prea densa sau sfaramicioasa este necesar sa adaugati inca o picatura de lichid (sau de apa distilata).



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

3. Inserati preparatul cu ajutorul unui aplicator de amalgam sau similar (poza 5).

Atunci cand este amestecat cu lichid MTA+ sau cu apa distilata, preparatul trebuie folosit in urmatoarele 10 minute.