

Sistem taiat si finisat Do-All Proxicut Tor Vm



Pret:

373,37 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Set Proxicut System:

- Suport Proxicut cu cheie = 1 buc
- Mâner = 1 buc
- Benzi diamantate Proxicut (grosier) = 12 buc
- Benzi diamantate Proxicut (medii) = 12 buc
- Benzi diamantate Proxicut (fine) = 12 buc
- Pânze de fer?str?u Proxicut = 12 buc

Do all Proxicut este un sistem de benzi de restaurare care este proiectat pentru a obține o ajustare excelentă a contactului proximal și o aezare marginală completă a coroanelor, fațetelor, inlay-urilor/onlay-urilor și conturarea proximală a obturațiilor compozite cu acuratețe, cu timp și efort minim. Proxicut IPR (InterProximalReduction) face ca îndepărtarea smalului interproximal să fie sigură și precisă, fără a crea coluri ascuțite

sau margini subgingivale.

Sistem conceput pentru utilizarea și cu tratamente ortodontice. Benzile flexibile se pot curba și se pot conforma conturilor naturale ale dinților pentru a maximiza confortul și siguranța pacientului.

Proxicut vine cu o bandă de margine a dintelui de ferstru (lamă) pentru țiere și o bandă cu suprafața abrazivă ondulată pentru curățarea dintre spațiul interdental și lustruirea suprafeței dintre dinți.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Introduceți suportul în orificiul unei lame sau unei benzi și îndoiți lama/banda în jurul ambelor brațe ale suportului

2. Introduceți degetul opus al suportului în al doilea orificiu al lamei/benzii și strângeți lama/benzii rotind mânerul cu șurub al suportului.

3. Când instrumentul este gata, puteți îndepărta excesul de material prin mișcarea de balansare a lamei/benzii în spațiul inter-proximal. Toate părțile sistemului sunt realizate dintr-un oțel inoxidabil chirurgical de înaltă calitate. Avantaje: • Designul ergonomic cu o singură mână oferă control tactil optim și reduce oboseala mâinii. • Elimina necesitatea de a tine instrumente mici și de a folosi instrumente rotative sau folii articulate. • Deschidere centrală pentru percepție vizuală îmbunătățită și acces pentru instrumente. • Designul prietenos cu pacientul previne iritarea tesuturilor moi. • Benzile flexibile se conformează conturilor naturale ale dinților pentru a evita crearea colțurilor ascuțite. • Autoclavabil și reutilizabil. • Nu va îndepărta smalțul excesiv. • Economisește timpul pe scaun. • Eficient pentru zonele anterioare și posterioare. CUM SE OPERA CU DO-ALL PROXICUT HOLDER ? 1.369: Rotiți șurubul 1 pentru a apropia brațele suportului do-all proxicut pentru a face distanța dintre marginile exterioare

ale bra?elor suportului egal? cu lungimea pânzei de fer?str?u ? 1.384 sau a benzii de diamant ? 1.385. Introduce?i pânza de fer?str?u ? 1.384 sau banda diamantat? ? 1.385 în clemele 2 ale bra?elor suport ?i strânge?i clemele cu cheia 3.

Mod de utilizare :


1. Roti?i mânerul ?urubului 1 pentru a apropia picioarele suportului do-all proxicut, astfel încât distan?a dintre p?r?ile exterioare ale picioarelor suportului s? devin? egal? cu lungimea lamei



2. Introduce?i lama (banda) în clemele 2 ale picioarelor suportului ?i strânge?i clemele cu cheia 3.



3. Roti?i mânerul ?urubului 1 pentru a strânge lama (banda) între picioarele suportului.

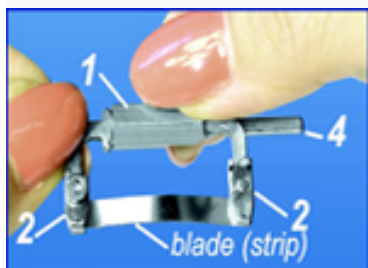

4. Fixarea suport-mâner

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



5. Suportul Do-all Proxicut poate fi, de asemenea, operat f?r? mâner sau fixat într-o pies? de mân? de tip EVE, oferind mi?care înainte ?i înapoi.

