


## MTA Fillapex Tub 30gr pasta-pasta

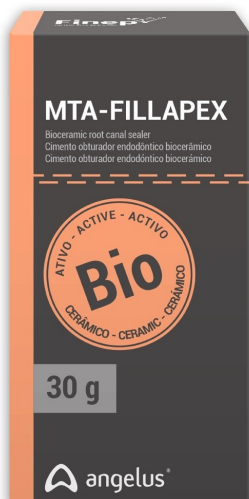

Pret:

**220,84 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

MTA Filapex este un ciment pentru obturatii definitive bazat pe MTA, dezvoltat de catre firma Angelus / Brazilia.

A fost lansat spre comercializare in 2010 si combina avantajele MTA cu cele ale unui produs superior pentru obturatii definitive. Formula sa in sistemul pasta / pasta permite umplere completa a intregului canal, inclusiv a canalelor laterale.

MTA prezent in compozitia MTA Filapex este mult mai stabil decat hidroxidul de calciu, furnizand o eliberare constanta de ioni de hidroxid de calciu, mentinand un PH ridicat cu efecte antibacteriene.

Acest produs este **fara eugenol** si nu interfereaza cu procedurile adezive din interiorul canalului. Deasemenea nu cauzeaza o decolorare a structurii dintelui.

### Indicatii :

- o MTA Filapex este indicat in obturatia definitiva de canal.
- o Se aplica cu conuri de gutaperca sau cu acul Lentullo.
- o Deasemenea se poate utiliza tehnica de condensatie termica, pentru ca punctul de fierbere al MTA Filapex este de 150 grd C.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

### **Contraindicatii :**

- o La pacienti cu hipersensibilitate la rasini sau alte componente ale produsului.

### **AVANTAJE :**

- o Sistem pasta/ pasta: usor de utilizat
- o Fluiditate excelenta : permite obturarea perfecta a canalelor
- o Timp de lucru : 35 minute
- o Timp de priza : 130 minute
- o Radiopac : vizibil pe radiografie
- o Solubilitate scazuta : o mai buna sigilare si durabilitate a obturatiei.
- o Usor de indepartat : daca este necesar poate fi usor de indepartat
- o Compozitie :



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Utilizarea MTA Filapex asigura o alcalinitate ridicata favorizand mineralizarea tesutului dur, oferind un mediu antibacterial foarte bun.

Usor de indepartat daca este necesar.

MTA Filapex poate fi indepartat prin interventie chimica sau mecanica sau printr-o combinatie mecanico- chimica.

Pot fi folositi solventi pe baza de ulei citric si cloroform.

Cercetari referitoare la indepartarea condensarii laterale a canalului utilizand ace si eucaliptol au aratat ca MTA Filapex este mult mai usor de indepartat decat alte cimenturi ( AH PLUS, SEALAPEX, REAL SEAL E ENDOFIL ) . ( SANTOS , LGP 2011 ) .

**Mod de prezentare :**

- pasta / pasta.- 30g
- pasta baza- 18g / pasta catalizator – 12g



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273