

Seringa Amaris Gingiva Nature 4gr

Pret:

498,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Amaris Gingiva este un material de restaurare, fotopolimerizabil, radioopac ce conține 80% material de umplere într-o matrice de metacrilat și care se poate polimeriza folosind lumină albastră.

Indicații de utilizare:

- Restaurări de clasa V-a (carii de colet, eroziuni ale rădăcinii, defecte în formă de V) și în special în cazurile de retracție gingivală;
- Restaurarea zonei de colet, decolorată, hipersensibilă, în special în zona frontală a dinților;
- Corecții estetice ale pozițiilor greșite ale dinților, pentru fațete directe, acoperiri și corecții ale aspectului estetic roșu-alb.

Mod de utilizare:

Prepararea: Se prepară dintele care urmează a fi tratat printr-un periaj profesional cu pastă fluor. Se asigură că mediul de lucru este suficient de uscat. Se recomandă utilizarea unui sistem de digă.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cur??area:

- Se îndep?rteaz? toate resturile din cavitate folosind un jet de ap?;
- Trebuie evitat? contaminarea cavit??ii cu sânge sau saliv? dup? cur??are;
- Se îndep?rteaz? resturile de ap? c un jet slab de aer, f??r? a se usca prea mult dentina.

Alegerea culorii produsului:

Nature (natural) – Culoare de baz? a gingiei.

Amaris Gingiva se aplic? cu ajutorul unui sistem adeziv dentin?/smal?. Pot fi folosite toate tipurile de sisteme adezive fotopolimerizabile.

Mod de aplicare:

Se aplica? materialul de restaurare în straturi cu o grosime mai mare de 2mm. Fotopolimeriza?i fiecare strat timp de 40 secunde.

Folosi?i benzi de celuloid transparente ?i pene.

Mod de prezentare:

- 1x Amaris Gingiva Nature 4g