

Pivoti endodontici metalici Nordin



Pret:

30,10 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Pivoti cilindrici metalici auriti cu cap pentru cheie de pivoti in cruce.

Mod de folosire a pivotilor

Utilizati o freza corespunzatoare marimii pivotului pe care intentionati sa il folositi. Canalul radicular trebuie sa fie largit cu freza reamer si adancit la dimensiunea dorita. Trebuie evitata miscarea excentrica a



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
frezei.

Folosind cheia de pivoti, pivotul trebuie insurubat in radacina pentru a verifica lungimea canalului. Dupa ce ati facut acest lucru indepartati prin desurubare pivotul.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dupa curatarea si uscarea canalului radicular si a pivotului, pivotul este inmuat in ciment si insurubat. Un pivot insurubat in canalele medial si distal ofera o buna ancorare. Pivotii endodontici va ofera aceasta posibilitate datorita varietatii in marime disponibile.

Prezentare

- cutie cu 12 buc
- marime selectabila din lista



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273