

Kit discuri spiralate finisat/lustruit Sof-Lex



Pret:

235,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Discurile spiralate Sof-Lex™ reprezintă un sistem unic, simplu și rapid de finisare a restaurărilor pentru un aspect natural. De ce să utilizați ace, pahare, discuri și perii când o singură formă este suficientă?

Discurile spiralate Sof-Lex Spiral...

- Se adaptează la toate suprafețele dinților, funcționează din orice unghi
- Sunt eficiente și potrivite atât pentru restaurări anterioare cât și posterioare
- Se obține rapid un luciu natural

Caracteristici și Beneficii

Discurile spiralate pentru finisare și lustruire Sof-Lex™ reprezintă unelte versatile ce trebuie utilizate după realizarea conturului! Designul inovator al acestor noi produse face finisarea și lustruirea mai ușoară și convenabilă.

- Forma unică și flexibilă se adaptează ușor suprafețelor iregulate, convexe și concave ale dinților.
- Restaurările anterioare și posterioare pot fi finisate și lustruite cu o singură unealtă pentru toți pașii, nu

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
este necesar să oscilați între ace, discuri și perii.

- Se pot utiliza toate părțile discurilor spiralate: lateral, sus, jos și vârf. De aceea, discurile spiralate sunt eficiente din orice unghi.
- Discurile spiralate fine (bej) netezesc și îndepărtează zgârieturile care apar pe restaurări în timpul conturării și pregătesc suprafața pentru lustruire.
- Discurile spiralate superfine (albe) creează o lustruire foarte netedă și lucioasă.
- Discurile spiralate pentru finisare și lustruire Sof-Lex™ sunt de unică folosință și funcționează fără pastă sau fără răcire cu apă.

Ocluzal

Bucal



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Posterior lingual

Anterior lingual



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Facial

Interproximal

Indicații

Indicat pentru finisarea și lustruirea unei mari varietăți de restaurări directe și indirecte:

- Materiale compozite

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Ciment ionomer de sticlă modificat cu rășini
- Materiale temporare bisacrilice
- Rășini nano-ceramice – Lava™ Ultimate CAD/CAM
- Materiale prețioase și semi-prețioase

Date tehnice

Performanță convingătoare

Performanța sistemelor de finisare și lustruire este evaluată în mod obișnuit măsurând suprafața luciului și degajarea de căldură.

Obținerea luciului

Suprafața luciului sau reflectia indică felul în care lustruirea sau strălucirea suprafeței se pot menține după tratament. Un gloss ridicat indică o suprafață strălucitoare. Studiul indică faptul că discurile spiralate pentru finisare și lustruire Sof-Lex™ Spiral realizează o suprafață netedă și mai bună decât alte produse existente pe piață.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

S-au pregatit mostre de Filtek™ Ultimate si tratate cu banda abraziva 320 Grit pentru a obtine o suprafata uniforma si relevanta clinic inainte de lustruire. Apoi au fost tratate cu diverse sisteme de lustruire. Sursa: date interne 3M ESPE.

Rugozitatea suprafetei

Rugozitatea suprafetei masoara netezimea sau asperitatile suprafetei inainte si dupa tratament. Discurile spiralate pentru finisare si lustruire Sof-Lex™ Spiral realizeaza o suprafata mai neteda comparabila cu alte produse existente pe piata.

- Rugozitatea suprafetei se poate masura utilizand profilometrul.
- Se utilizeaza SEM pentru a masura rugozitatea suprafetei.

Degajarea de caldura

Multe echipamente de finisare si lustruire degaja caldura in timpul utilizarii. Producatorii pot recomanda racirea cu apa sau presiune intermitenta pentru a asigura ca nu se acumuleaza caldura excesiva.

Discurile spiralate pentru finisare si lustruire Sof-Lex™ Spiral genereaza mai putina caldura decat sistemele pe baza de guma de finisare si lustruire.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Temperatura suprafetei a fost masurata înainte si dupa tratament.

Prezentare

- **5 discuri spiralate pentru finisare Sof-Lex Spiral ,**
- **5 discuri spiralate pentru lustruire Sof-Lex Spiral ;**
-