

Dezinfectant freze Dentasept rotativ 2L



Pret:

150,39 lei TVA inclusa

Descriere produs:

DETERGENT DEZINFECTANT PENTRU FREZE,

- Solu?ie gata de utilizare
- Compatibil cu o gam? larg? de materiale, nichel, titan, carbur? de
- Timp de contact începând cu 5 minute
- Propriet??i microbiologice excelente - eficacitate împotriva
- Poate fi utilizat într-un aparat de cur??at cu ultrasunete



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

INSTRUCȚIUNI DE

Soluție gata de utilizare.

1. Turnați Dentasept Special Rotativ

2. Imersați complet instrumentele

în soluție, acoperiți și lăsați la înmuiat. Respectați timpul minim

3. Scoateți instrumentele din soluție.

Clătiți riguros cu apă potabilă

4. Uscați corespunzător

Înlocuiți soluția imediat ce este vizibil

PENTRU INFORMATII DE UTILIZARE SI CONTINUT, VA RUGAM CONSULTATI BROSURA ATASATA!

PREZENTARE: