

Panavia V5 Tooth Primer 4ml

Pret:

441,06 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Adezivul ideal pentru conditionarea tesuturilor dentare (dentina/smalt) in vederea cimentarii lucrarilor protetice cu Panavia V5

Deoarece contine monomerul MDP, este ideal si pentru conditionarea suprafetelor metalice nenobile sau din compozit.

*Pentru aliaje nobile recomandam Alloy Primer de la Kuraray.

Cimentarea coroanelor

Zirconia

Curatati si uscati suprafata dintelui in mod obisnuit. Dupa cum este necesar, potriviti coroana folosind pasta de incercare, spalati si indepartati

Ceramica cu dioxid de siliciu (disilicat de litiu)

Curatati si uscati suprafata dintelui in mod obisnuit. Dupa cum este necesar, potriviti coroana folosind pasta



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
de incercare, spalati si indepartati

Ceramica cu dioxid de siliciu (portelan)

Curatati si uscati suprafata dintelui in mod obisnuit

Cimentarea pivotilor

Dupa prepararea cavitatii si potrivirea de proba a pivotului

Prezentare

Flacon 4 ml