

Adeziv foto autogravant G-Aenial Bond

Pret:

536,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

GC G-aenial Bond va ofera o adeziune puternica si sigura atat la smalt, cat si la dentina, indiferent de tehnica pentru care optati. Cu GC G-Aenial Bond obtineti simplitatea si sensibilitatea postoperatorie redusa a unui adeziv autodeminerizant combinate cu rezistenta marita a adeziunii atunci cand optati pentru deminerizarea selectiva a smaltului timp de 10 secunde.

Nivelul ridicat de monomer ester fosfat optimizeaza deminerizarea si imbunatateste calitatea stratului hibrid. Zona de nanointeractiune care rezulta si formula fara HEMA reprezinta factorii cheie ai adeziunii superioare, de lunga durata.

Caracteristici si beneficii

- Poate fi utilizat ca adeziv autodeminerizant sau cu deminerizare selectiva a smaltului, selectand cea mai buna optiune in functie de situatie
- Rezistenta superioara a adeziunii la smalt si dentina datorita combinatiei dintre adeziunea chimica si cea micromecanica
- Rezistenta de lunga durata a adeziunii datorita formulei fara HEMA
- Integritate marginala excelenta
- Fara sensibilitate postoperatorie, indiferent de tehnica sau compozitul utilizat
- Eficienta clinica dovedita prin teste independente
- Procedeu de lucru simplu si rapid

Mod de utilizare

Aplicati adezivul si asteptati 10 secunde. Uscati bine timp de 5 sec. cu aer la presiune MAXIMA si fotopolimerizati timp de 10 sec. In cazul deminerizarii selective, aplicati pe smalt acid fosforic 35-50% timp de 10 sec inainte de a aplica agentul de adeziune.

Apoi continuati cu etapele obisnuite urmand instructiunile de mai sus.

Prezentare

- flacon 5 ml