

Lac de fluorizare Fluorodose

Pret:

4,79 lei TVA inclusa



Descriere produs:

FluoroDose™ este un lac de fluorizare ce contine 5% fluorura de sodiu ambalat in unidoza LoliPack patentata. Asepsie totala si usor de aplicat. FluoroDose se aplica usor si repede, oferind pacientului dozajul maxim aprobat de FDA. FluoroDose nu coloreaza dintii in culoarea galbena.

Fiecare unidoza contine 0.3 ml si un aplicator BendaBrush care ajuta la mixarea lacului inainte de aplicare si garanteaza un nivel constant de fluor la fiecare aplicare. Doar indepartati ambalajul, inmuati aplicatorul, mixati si aplicati.

Nota: O unidoza FluoroDose™ ajunge pentru aplicarea pe toti dintii

"The ADA (American Dental Association) considers fluoride varnish to be safe and efficacious as part of a caries prevention program that includes caries diagnosis, risk assessment, and regular dental care."

- Tot ce aveti nevoie intr-un singur ambalaj, sigilat si gata de folosire
- Procedura intr-un singur pas
- Fara geluri si fara solutii pentru clatire
- Elimina / reduce pe loc sensibilitatea dentinara
- Oferă o evidenta perfecta a stocurilor

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Face priza rapid in prezenta salivei
- Ramane pe suprafata dintelui pana la 6-8 ore pentru cea mai buna si completa absorbtie de fluor
- Nu necesita izolarea dintilor iar pacientul poate pleca imediat dupa aplicare
- Disponibil in diferite variante de aroma
- Nu coloreaza dintii

FluoroDose este o fluorura de sodiu cu o concentratie foarte mare, care se aplica local, la nivelul dintilor de catre medicul dentist. Desi nu este un lac permanent, datorita naturii sale aderente , acest lac este capabil sa ramana in contact cu suprafata dentara pana la cateva ore. Poate fi aplicat la nivelul smaltului, dentinei sau cementului, fiind folosit pentru a prevenii caria dentara, pentru remineralizarea suprafetei dentare si pentru a trata hipersensibilitatea dentinara. Este folosit pe scara larga inca de la inceputul anilor '80 in tarile vest europene, in tarile scandinave si in Canada si de curand si in Statele Unite.

Procedura de aplicare:

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Desi nu este neaparat nevoie sa se faca un periaj profesional inainte de aplicare, este recomandat ca dintii sa fie curatati cel putin cu o periuta dentara.
- FluoroDose adera de dinti inclusiv daca acestia sunt umezi.
- Mixati lacul cu ajutorul aplicatorului.
- Aplicati un strat subtire de lac cu aplicatorul inclus in unidoza.
- FluoroDose adera de dinti dupa aplicare, in prezenta salivei.
- Este recomandat ca dupa aplicarea FluoroDosei pacientul sa nu se perieze pana la sfarsitul zilei. Periajul poate fi reluat incepand cu a doua zi.
- Pentru a fi eficient in prevenirea cariei dentare lacul trebuie aplicat cel putin de 2 ori pe an.

Avantajele FluoroDose fata de alte sisteme de fluorizare:

- Este disponibila in mai multe arome si nu are gustul amar al altor geluri de fluorizare.
- Este foarte usor si rapid de aplicat.
- Nu necesita instrumentar specializat.
- Face priza si adera de dinte in prezenta salivei.
- Fiindca nu necesita gutiere pentru aplicare, este varianta de fluorizare cea mai indicata in special la pacientii cu reflex de vomă pronunțat.
- Datorita timpului scurt de priza si a cantitatii mici, cantitatea de fluor ingerata este neglijabila.
- Datorita faptului ca adera de dinte, fluorul va fi in contact direct cu dintele timp de cateva ore.
- Este indicat si la copii sub 6 ani nefiind un factor de risc in aparitia florozelor dentare, fiindca aplicatia este topica.

Indicatii de utilizare:

- Ca agent de fluorizare la pacientii cu risc crescut si moderat de aparitie a cariei dentare, in special la pacientii pana in 5 ani.
- Ca agent desensibilizant pe suprafetele radiculare expuse.
- La pacientii la care nu se poate face fluorizare intr-un alt mod(gutiere, etc.)
- Ca metoda de prevenire a cariilor radiculare.
- Pentru fluorizarile necesare in timpul tratamentului ortodontic si dupa decimentarea bracketurilor.
- La pacientii ca care exista riscul de inghitire al solutiilor, gelurilor sau pastelor cu fluor.
- Dupa detartraj si periaj profesional.
- Dupa albirea dentara.
- La pacientii cu xerostomie.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- La pacientii cu reflux gastrointestinal.
- La pacientii care locuiesc in zone in care apa este saraca in fluor.
- La pacientii cu carii incipiente, sau carii active.

Prezentare

- Unidoza care contine varnishul si pensula aplicatoare suficient pentru un pacient
- Arome: caramel, menta, bubble gum, pepene si cirese