

Compozit dual Encore D/C Minimix 12 Cps



Pret:

747,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Singurul Compozit Dual pentru Reconstructii de Bonturi Ambalat la Cartuse Automixante MiniMix.

Noul material Encore D/C MiniMix, este singurul compozit dual creat special pentru reconstructii de bonturi care este ambalat la cartuse automixante care folosesc tehnologia Mini Mix. Reduceti pierderile prin folosirea celui mai mic cap automixant. Aplicati de la baza cavitatii sau de la nivelul canalului radicular cu ajutorul varfului metalic.

- Lucrati mai rapid.
- Nu mai aveti nevoie sa folositi matricile.
- Se slefuieste precum dentina fara sa apara santuri.
- Fara necesitatea mixarii manuale a componentelor.
- Economisiti mai mult timp.
- Economisiti mai multi bani.
- Reduceti stresul pacientului.
- Obtineti constant rezultate de calitate fara compromisuri.
- Cimentati pivotii de fibra de sticla, de carbon sau de titan.

Este chiar atat de usor. Doar introduceti cartusul Encore® D/C MiniMix in pistolul pentru aplicare si impingeti materialul prin varful unic. Sunteti gata sa finisati preparatia in doar patru minute. Formula avansata, tixotropica a lui Encore® D/C MiniMix face ca materialul sa curga usor prin varful de aplicare,

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
dar odata aplicat acesta isi va pastra forma facand utilizarea formelor si matricilor inutile.

Un cartus poate fi folosit chiar si pana la 3 preparatii, netrebuind decat sa schimbati varful automixant.

Cimentati pivotii de fibra de sticla, de carbon sau de titan cu Encore D/C® MiniMix™, reconstruiti bontul fara a fi nevoie sa aplicati materialul in straturi, accelerati polimerizarea prin fotopolimerizare sau asteptati doar 4 minute, apoi slefuiti.

Desi il aplicati usor ca pe un compozit flow, formula unica a lui Encore D/C® MiniMix™ ii confera capacitatea de a nu curge, astfel incat nu aveti nevoie de matrici.

Nota: Inaintea cimentarii pivotilor cu Encore D/C® MiniMix™ ,trebuie sa tratati canalul radicular cu acid si cu adeziv dual (Adeziv + Activator) pentru a asigura o polimerizare completa si sigura chiar si in interiorul canaliculelor dentinare.

Pentru cele mai bune rezultate va recomandam folosirea adezivului autogravant cu priza duala Connexio.

In cazul in care exista suficienta structura dentara(si in acest caz ne referim la structura dentara ramasa in urma slefuirii bontului) si actul terapeutic nu necesita folosirea pivotilor pentru a creste retentia, puteti folosi doar adeziv fotopolimerizabil.

Largiti canalul si bizotati marginile ascutite.

Demineralizati, spalati si uscati.

Aplicati bondingul dupa instructiunile producatorului.

Aplicati materialul incepand de la baza preparatiei cu o presiune constanta.

Continuati sa aplicati materialul in timp ce retrageti varful.

Fotopolimerizati si apoi asteptat ca intreg volumul de material sa se autopolimerizeze. Obineti un bont rezistent si durabil.

Dintr-un cartus Encore D/C Minimix, puteti realiza pana la 2 sau chiar 3 reconstructii de bonturi

In timp ce Encore D/C MiniMix, este un material core build-up creat special pentru reconstructii de bonturi, are rezistenta crescuta datorita particulelor de umplutura mai mari, este dual, se aplica foarte usor, nu curge eliminand necesitatea folosirii matricilor si NU necesita polimerizarea in straturi:

*Materialul compozit fotopolimerizabil pentru restaurari este creat pentru estetica si polisabilitate, necesita polimerizarea in straturi si are o contractie de priza crescuta si nu este creat pentru reconstructia de bonturi.

*Cimenturile glasionomere nu au o rezistenta suficient de mare pentru a suporta o lucrare protetica pe o perioada lunga de timp, au costuri mari, si sunt dificil de aplicat.

*RCR-ul provoaca uneori fracturi radiculare (din 10 fracturi radiculare, 9 sunt produse de RCR-uri si doar o fractura este produsa de un pivot de sticla sau de titan cimentat pe canal) si implica suplimentar o etapa de laborator si inca o etapa clinica.

Cu Encore D/C Minimix puteti cimenta inclusiv pivotii de sticla sau de titan pe canalele

Demineralizati, aplicati adeziv dual pentru a avea siguranta polimerizarii chiar si in interiorul canaliculelor dentinare.

Aplicati bondingul si pe pivot.

Aplicati Encore D/C Minimix in interiorul canalului.

Introduceti pivotul in canal.

Continuati sa reconstituiti cu Encore D/C Minimix in jurul pivotului fara a-l pune in straturi. Polimerizati. Slefuiti. Obtineti bontul.

Timpul total de polimerizare este de 4 minute, puteti accelera polimerizarea prin fotopolimerizare: 20 de secunde se polimerizeaza pe o adancime de 2mm., iar la 40 de secunde pe o adancime de 4mm.

Nu necesita refrigerare.

Prezentare

- folie cu 12 capsule (0.5 ml-1.36 grame x 12)



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 24 varfuri automixare