

Sablon folii diga Cerkamed

Pret:

62,23 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sablonul pentru folii de diga va permite sa dati foarte usor gaura pentru dinte in folia de diga. Simplu, la indemana si reutilizabil!




Folosirea produsului Rubber Dam Template:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

1. Luati o folie de diga si o folie din sablonul de diga.
2. Pozitionati folia de diga deasupra sablonului si potriviti-le.
3. Folosind un marker selectati dintele ce urmeaza a fi izolat.
4. Efectuati o gaura folosind un cleste perforator de diga.

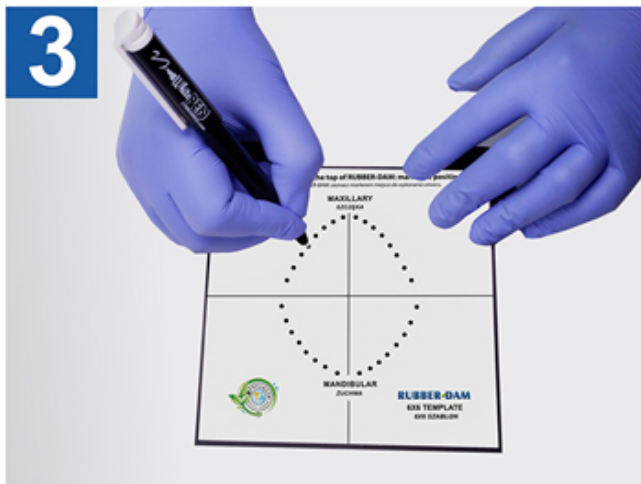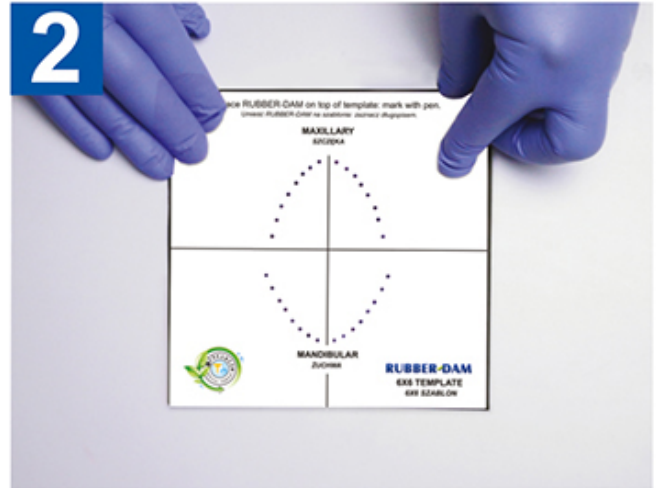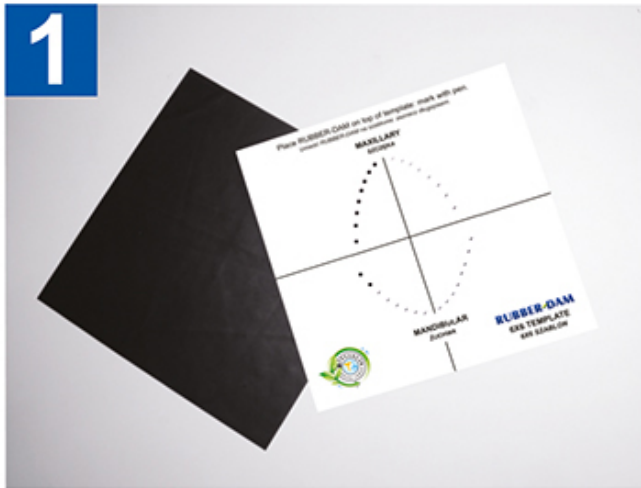

Dimensiune:

- 6X6 – 150×150 mm