


Kit matrici dr. Walser 18 matrici

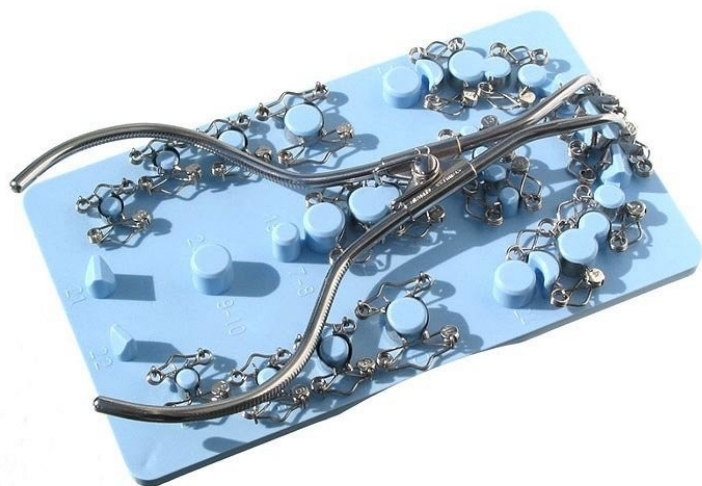

Pret:

1.918,71 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Matricile Walser se caracterizeaza printr-o adaptabilitate optima datorita aplicarii dintr-o singura miscare. Matricile Walser necesita rareori fixarea lor cu pene deoarece acestea se fixeaza foarte bine pe dinte, fiind foarte subtiri (doar 0,05 mm). Pacientul poate chiar musca atunci cand matricea este fixata pe dinte.

Avantaje:

- se fixeaza si se scoate in cateva secunde
- o obturatie optima intr-un timp f.scurt si dintr-o singura miscare
- fixeaza sigur si solid ca un corset
- se adapteaza automat la forma conica a dintilor
- pacientul poate inchide gura si musca
- fara insurubare si strangere
- suportul ideal pentru rulouri
- sterilizare simpla si utilizare indelungata
- foarte subtiri, numai 0,05 mm

Forme si zone de aplicare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Video aplicare forma X

Forma X

- Obturatii pe doua suprafete interdentare

Forma O (circulara)

Video aplicare forma O

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Obturatii MOD
- Obturatii pe dinti individuali

Aplicarea si inlaturarea matricilor WALSER

Forma X

Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Inserati matricea in spatiul intrdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.



Inlaturarea matricii

Retensionati matricea in punctul maxim. Acest pas este important pentru a nu deteriora obturatia bine conturata. Inainte de a o inlatura, matricea trebuie deplasata cu o miscare usoara de balansare in jurul axei sagitale, in acest fel benzile se vor indeparta mai usor de materialul de obturatie.



Forma O

Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



Inserati matricea in spatiul interdental. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Matricea WALSER este aplicata imediat si este fixata strans si sigura ca un corset.



Inlaturare: similar ca la forma X

Forme

No.	Forma	Caracteristici speciale	Inaltimea benzii	Aplicabilitate
	1X	potrivit si pentru molari de lapte	5,0 mm	BICUS
	2X		6,5 mm	BICUS
	3X		5,0 mm	MOLAR
	4X		6,5 mm	MOLAR
	5O	potrivit si pentru molari de lapte	5,0 mm	BICUS SMALL
	6O		6,5 mm	BICUS SMALL
6c NEW	O	o parte a benzii cu 3 mm mai lunga	5/8 mm	BICUS
	7O	potrivit si pentru molari de lapte	5,0 mm	BICUS

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

80	6,5 mm	BICUS
90	5,0 mm	MOLAR
100	6,5 mm	MOLAR
10c NEW O	o parte a benzii cu 3 mm5/8 mm mai lunga	MOLAR
11XF	banda are o despicatora la6,5 mm capat	11, 12, 21, 22
12XF	8,0 mm	11, 12, 21, 22
	14 X 6,5 mm 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42	
	15 O	
13X	benzi metalice extra scurte/5,0 m potrivit si pentru molari de lapte	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
14X	benzi metalice extra scurte 6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
150	5,0 mm	31, 32, 41, 42
160	6,5 mm	31, 32, 41, 42
17X	benzi metalice extra inalte 8,0 mm	4-5
18X	8,0 mm	6-8
190	8,0 mm 4 - 5	8-Jun
	20 O	
210F	banda are o despicatora8,0 mm spre capat	11, 21
220F	8,0 mm	12, 22
230N	benzi metalice mai lungi,5,0 mm intindere a lor mai mare	6-8
240N	se ataseaza peste clema de 6,5 mm diga	5 - 9
250	marime medie 5,0 mm (Forma speciala pentru molarii de lapte; deasemenea foarte potrivite nr.. 1, 5, 7, 13)	Molar de minte V



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Kitul contine 18 matrici, de la 1 la 18 , incluzand matricile pentru frontali 11 si 12 si matricile mai inalte, extra high X-shape , 17si 18 pentru cariile subgingivale. Matricile sunt montate pe tavita autoclavabila .

Kitul contine si clestele aplicator.