

Adeziv polieter

Pret:

163,51 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Descrierea produsului

Adezivul pentru polieteri produs de firma 3M ESPE asigură adeziunea fermă a materialelor de amprentă din categoria polieteri de lingurile de amprentă (a nu se utiliza în cazul materialelor de amprentă din clasa polivinil siloxani).

Păstrați instrucțiunile de utilizare ale produsului în cauză pe toată perioada folosirii sale.

Indicații de utilizare

Toate tipurile de linguri metalice și lingurile uzuale din metacrilati.

Aplicare

Aplicați pe suprafața lingurii de amprentă un strat subțire de adeziv cu pensula. Lăsați să se usuce complet (minim 30-60 sec), și apoi verificați cu pulpa degetului uscarea. Cu cât permiteți un timp mai lung pentru uscare (ideal 15 min) cu atât adeziunea va fi mai puternică.

Curățare

Urmele de material de amprentă sau adeziv rămase pe lingură se îndepărtează ușor cu acetonă.

Note

Flacoanele cu adeziv umplute în exces (prin adăugarea unor cantități de adeziv rămase din alte flacoane) pot exploda chiar și la o ușoară încălzire.

Adezivul pentru polieteri poate să nu asigure o adeziune satisfăcătoare la lingurile de amprentă realizate din alte materiale plastice sau din placă de bază.

Trebuie evitată aplicarea adezivului pe materiale textile, suprafețe din material plastic sau lăcuite, etc., deoarece acesta nu va mai putea fi îndepărtat în totalitate.

Utilizați adezivul pentru polieteri numai în spații bine aerisite.

Spălați cu apă tegumentele expuse contactului accidental.

Incompatibilități

La persoanele sensibile poate apărea o reacție alergică în urma contactului cu acest material. Dacă se observă apariția unei reacții alergice, folosirea materialului trebuie imediat întreruptă și acesta îndepărtat în totalitate.

Condiții de păstrare și valabilitate

Nu păstrați produsul la temperaturi mai mari de 25°C/77°F.

Nu folosiți produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Condiții de păstrare și valabilitate

Nu păstrați produsul la temperaturi mai mari de 25°C/77°F.

Nu folosiți produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Descrierea produsului

Adezivul pentru polieteri produs de firma 3M ESPE asigură adeziunea fermă a materialelor de amprentă din categoria polieteri de lingurile de amprentă (a nu se utiliza în cazul materialelor de amprentă din clasa



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
polivinil siloxani).

Păstrați instrucțiunile de utilizare ale produsului în cauză pe toată perioada folosirii sale.

Indicații de utilizare

Toate tipurile de linguri metalice și lingurile uzuale din metacrilati.

Aplicare

Aplicați pe suprafața lingurii de amprentă un strat subțire de adeziv cu pensula. Lăsați să se usuce complet (minim 30-60 sec), și apoi verificați cu pulpa degetului uscarea. Cu cât permiteți un timp mai lung pentru uscare (ideal 15 min) cu atât adeziunea va fi mai puternică.

Curățare

Urmele de material de amprentă sau adeziv rămase pe lingură se îndepărtează ușor cu acetonă.

Note

Flacoanele cu adeziv umplute în exces (prin adăugarea unor cantități de adeziv rămase din alte flacoane) pot exploda chiar și la o ușoară încălzire.

Adezivul pentru polieteri poate să nu asigure o adeziune satisfăcătoare la lingurile de amprentă realizate din alte materiale plastice sau din placă de bază.

Trebuie evitată aplicarea adezivului pe materiale textile, suprafețe din material plastic sau lăcuite, etc., deoarece acesta nu va mai putea fi îndepărtat în totalitate.

Utilizați adezivul pentru polieteri numai în spații bine aerisite.

Spălați cu apă tegumentele expuse contactului accidental.