



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Hipoclorit Chloraxid 2% gel 2ml

Pret:

16,48 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Hipoclorit de sodiu 2% sub forma de gel, pentru tratamentul endodontic

Consistenta de gel permite minimizarea riscului de depasire in tesuturile moi si asigura un control precis al aplicarii. Produsul este solutia ideala pentru cazurile dificile: apexuri largi, nedevelopate sau afectate, perforatii, dinti superiori. In acelasi timp, produsul minimizeaza riscul de patare a hainelor si adera la instrumentul cu care se efectueaza tratamentul endodontic.

Ingrediente:

- hipoclorit de sodiu (2% clor activ), apa purificata Ph Eur, baza gel

Prezentare

- seringa 2 ml + aplicatoare

Metoda:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Scufundati aplicatorul in etanol inainte de utilizare, apoi montati-l la seringa de hipoclorit gel. Preparati canalul aplicand Chloraxid Gel direct in canal sau pe instrumentul cu care realizati prepararea mecanica. Preparati canalul radicular si clatiti cu ser fiziologic, cu ajutorul unui ac cu bizouri laterale. Clatiti alternativ cu EDTA. Repetati de cateva ori.

Produsul este destinat uzului repetat. Aplicatoarele sunt de unica folosinta. Re-utilizarea aplicatoarelor implica risc de infectie.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL