

## BIO MTA+ MINIKIT

Pret:

**160,76 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

BIO MTA+ Mini - Biomaterial pentru obturarea si reconstructia canalelor radiculare – alb, 3 x 0,14 g BIO MTA+ praf, 1 ml lichid

**BIO MTA+ este recomandat in special pentru urmatoarele cazuri:**

- Perforatii ale peretelui canalului radicular
- Resorbtiile la nivelul canalului radicular
- Obturarea retrograda a apexului
- Coafaj pulpar
- Amputatie pulpara
- Tratamentul dintilor cu dezvoltare radiculara incompleta

**Bio MTA+ nu este potrivit ca unic material de obturare a canalului.**

### Caracteristici

- Durata de aplicare – 4 minute.

- Durata de polimerizare – 2 h dupa aplicare.
- Permite tratamentul intr-o sedinta.
- Remineralizeaza tesutul dentar si sustine regenerarea tesuturilor.
- Este compus din nanoparticule.
- Contine hidroxiapatita, component natural al osului.
- Este perfect biocompatibil.
- Este exceptional de plastic, motiv pentru care se aplica optim in cavitati cu forma neregulata si nu sunt necesare unelte complicate pentru aplicarea acestuia.
- Are o durabilitate de 3 ori mai mare in comparatie cu materialele MTA clasice.

## **Ingrediente:**

Bio MTA+ praf: oxid de calciu, hidroxiapatita, oxizi de: silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, magneziu, zirconiu; fosfat de calciu.

Bio MTA+ lichid: apa purificata Ph Eur, catalizator de calciu.

## **Prezentare**

- 3 x 0,14 g BIO MTA+ praf, 1 ml lichid

## **Mod de utilizare**

1. Taiati varful recipientului de lichid de Bio MTA+.
2. Amestecati intregul continut al unui flacon de praf Bio MTA+ cu una, doua picaturi de lichid pe o placuta de amestecare.
3. Amestecati pentru aproximativ 30 de secunde pana cand amestecul capata o consistenta de plastilina moale. Daca amestecul este prea gros au prea grunjos, adaugati inca o picatura de lichid Bio MTA+.
4. Daca amestecul este prea gros au prea grunjos, adaugati inca o picatura de lichid Bio MTA+.  
ATENTIE! Amestecati praful Bio MTA+ doar cu lichidul Bio MTA+. Nu inlocuiti lichidul cu apa sau alte produse!
5. Plasati amestecul in locul dorit cu un aplicator. Un flacon de praf Bio MTA+ contine o doza de unica folosinta.
6. Odata mixate componentele, consumati amestecul in maxim 4 minute. Preparatul se va intari ulterior.