

## Compozit colorat Rainbow Flow 1g

Pret:

**67,41 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Fiecare seringă vine în pachet cu gama de culori și cu insigne autoadezive pentru pacienții cuminti, adică pentru toți pacienții!

Compozitul fotopolimerizabil fluid Rainbow Flow este destinat copiilor și nu numai. Are o contractie la polimerizare scăzută și este foarte dur. Este disponibil în 6 culori vii și vesele, alese de către cei mai tineri dintre pacienți.

### Aplicatii

Compozitul fotopolimerizabil fluid Rainbow Flow este utilizabil în următoarele situații clinice:

- obturații ale dinților de lapte și permanenți
- sigilarea santurilor și fosetelor

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
- marcarea orificiilor radiculare

## Ingrediente

- Rasini metacrilice (bis-GMA, UDMA ,TGDMA), umplutura de nanoparticule anorganice, pigmenti, initiator foto, inhibitor

## Metoda de aplicare

- Scufundati aplicatorul in etanol inainte de utilizare, apoi montati-l la seringa flow colorat..
- Sigilarea santurilor si fosetelor:
- ~~Preparati si damina. Analizati defectul de santurile / fosetelor (max cu 2Blu si Etch) si apoi sigilati si uscati  
la lampa timp de 10 - 15 secunde. Adaugati compozitul de aproximativ 2mm grosime si fotopolimerizati  
nou..~~
- 
- **Marcarea orificiilor radiculare:**

Aplicati dupa obturarea permanenta a canalului radicular. Aplicati un strat de compozit de aproximativ 2 milimetri la intrarea in canal si fotopolimerizati cu lampa timp de 10 – 15 secunde. Culoarea diferita a compozitului va va ajuta sa localizati cu usurinta intrarea in canal in cazul tratamentelor ulterioare.

Retrageti pistonul seringii si sigilati ambalajul cu capacul original imediat dupa fiecare utilizare pentru a evita polimerizarea produsului in interior.

Produsul este destinat uzului repetat. Aplicatoarele sunt de unica folosinta. Re-utilizarea aplicatoarelor implica risc de infectie.

## Prezentare

- seringă 1g