

Septocal LC



Pret:

254,09 lei TVA inclusa

Descriere produs:

COMPOZITIE:

Hidroxid de calciu pasta; fluoruri; sulfat de bariu.

Excipienti: rasini biocompatibile.

Proprietati / avantaje

- este un liner monocomponent fotopolimerizabil;
- datorita hidroxidului de calciu, fluorului si a rasinilor folosite ca excipienti SEPTOCAL LC este insolubil si foarte rezistent in fluidele orale;
- SEPTOCAL LC poate fi folosit sub obturatiile de compozit inaintea demineralizarii precum si sub alte tipuri de obturatii cand, desi stratul de dentina este suficient de gros este indicata totusi folosirea unui liner;
- SEPTOCAL LC poate fi folosit ca baza opaca in cazul modificarilor de culoare;
- trebuie retinut ca acest produs nu poate fi folosit in cofajul direct.

Indicatii

- liner in cavitatile adanci.

Mod de folosire

- se indeparteaza capacul negru de la capatul seringii si se pune unul din cele doua tipuri de capete pe care le avem la dispozitie- de metal mai mic sau de plastic cu un diametru mai mare in functie de cavitate;

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- cavitatea trebuie spalata si uscata;
- pozitionam capatul seringii in zona cea mai adanca a cavitatii ce urmeaza a fi coafata;
- apasam pe capatul seringii depunand cantitatea necesara din produs;
- cu ajutorul varfului depunem corect materialul pe fundul cavitatii (nu trebuie ca SEPTOCAL LC sa ajunga in contact cu smaltul, si nici sa se imprastie pe peretii cavitatii);
- se fotopolimerizeaza timp de 20s si este indicat ca stratul de liner sa fie cat mai subtire de fiecare data fotopolimerizandu-se 20s;
- se indeparteaza varful folosindu-se altul pentru fiecare pacient si acoperim seringa

Continutul pachetului:

- 1 seringă a 3.5 g