

Solutie curatare si dezinfectare MULTISTERIL



Pret:

259,28 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lichid pentru curatarea si dezinfectarea instrumentarului folosind aparatul Multisteril.

Solutie concentrata, a se dilua 1%.

Flacon 1 litru.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

INSTRUCIUNI UTILIZARE LICHID MULTISTERIL (lb. Romana)

Noul lichid are o acțiune certificată de curățare și dezinfectare și va crește performanța dispozitivului.

Multisteril CD Ctrl+Alt a fost dezvoltat special pentru SISTEM MULTISTERIL cu sprijinul unor organisme importante, inclusiv Universitatea din Dresda, care a testat și certificat eficiența sistemului, pentru mai multe informații și detalii [http:// www.tecnogaz.com/tecnogaz/product_top.aspx?id=1218](http://www.tecnogaz.com/tecnogaz/product_top.aspx?id=1218)

Dacă utilizați acest lichid pentru prima dată, înainte de a-l introduce în recipientul specific din interiorul mașinii, trebuie să goliți complet rezervorul de orice lichid prezent, urmând instrucțiunile de pe spate.

Dacă nu efectuați această operație se vor amesteca două lichide diferite și este posibil să observați că lichidul din rezervor va capta un aspect lăptos.

De asemenea, vă informăm că acest lichid trebuie să aibă o concentrație de doar 1%, prin urmare intrați în meniul mașinii, secțiunea MODIFICARE CICLURI și modificați elementul CONCENTRAȚIE DETERGENT, acest lucru vă va permite să economisiți 50% față de diluția standard de 2%.

În perioada mai-iulie 2014, Institutul de Igienă și Microbiologie Medicală al Facultății de Medicină a Universității Tehnice din Dresda a efectuat teste tehnice și microbiologice privind utilizarea asociată a rezervorului multifuncțional Multisteril Tecno- Gaz și a lichidelor Tecno. -Gaz Ctrl line Stop (CD Multisteril). Testele efectuate au dovedit eficacitatea curățării și dezinfectării instrumentelor dispozitivului Multisteril în combinație cu Multisteril CD conform prevederilor Regulamentului EN 15883, un regulament european care specifică cerințele speciale pentru dispozitivele de spălare și dezinfecție (WDS) concepute pentru a atinge nivelul de dezinfecție care poate fi atins prin curățare și dezinfecție termică.

Setări recomandate cu dispozitivul Multisteril Tecno-gaz

Procent recomandat: 1%



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozitie (100 g):

7,0 g laurilpropilendiamină,

3,5 g dodecildipropiletriamină,

2,2 g alchilpropilendiaminoguanidină;

Restul până la obținerea a 100 g: agenți de emulsionare, agenți de complexare, agenți tensioactivi, apă demineralizată.