

Servetele dezinfectante OPTIM 1



Pret:

50,82 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Servetele umede pentru dezinfectarea suprafetelor si dispozitivelor medicale non-invazive.

Spectru larg de utilizare

Substanta activa: 0.5% apa oxigenata

Conform cu EN 13727, EN 13624, EN14348, EN 14476, EN 16615

Spectru de actiune si timpi de contact

Bactericid - 1min

Virucid - 30s

Tuberculocid - 1min

Micovbactericid - 1 min



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Levuricid - 1 min

Mod de utilizare

Suprafata trebuie sa ramana umeda pentru timpul de aplicare sugerat

Se sterge sau se clateste suprafata

Se recomanda clatirea periodica a suprafetelor - saptamanal

Servetelele umede trebuie utilizate in termen de 2 luni de la deschidere

Indicatii speciale

A nu se lasa la indemana copiilor

Trebuie evitat contactul cu ochii. In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu apa si se consulta un medic.

In cazul inghitirii, se clateste gura cu apa si se solicita sfatul medicului.

A se pastra la temperatura camerei (15 – 30°C). Daca a inghetat continutul, se agita si, inainte de utilizare se aduce la temperatura camerei.

Indicatii pentru utilizator

Produsul nu este recomandat pentru suprafete din alama sau cupru, instrumente din aluminiu eloxat sau instrumente din metale dure.

Prezentare

Tub 160 servetele