

Simplishade Bulk Fill seringa 4gr

Pret:

348,49 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Simplificati lucrurile cu o nuanta unica, intr-un singur pas

Restaurarile estetice sunt acum mai simple, cu SimpliShade™ Bulk Fill. Puteti sa renuntati la stratul de acoperire, efectuand o singura operatiune de aplicare, si sa simplificati inventarul la o singura nuanta pentru toate cele 16 nuante clasice VITA®. Datorita tehnologiei triple a raspunsului adaptativ (ART3), SimpliShade Bulk Fill ofera caracteristici de manipulare usoara si efort de contractie redus.

O SINGURA NUANTA ESTE TOT CE TREBUIE

SimpliShade™ Bulk Fill este indicat pentru restaurari de Clasa I-V – aplicarea directa a restaurarilor in zona frontala si laterala, refaceri de bont si repararea defectelor de restaurare.

Sistem cu nuanta unica

Utilizand un sistem cu nuanta unica, armonizat perfect cu toate cele 16 nuante clasice VITA®, SimpliShade Bulk Fill va economiseste timpul necesar pentru selectarea nuanțelor si gestionarea inventarului.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Un singur pas

Eliminati necesitatea unui strat de acoperire, realizand restaurari complete datorita compozitului SingleFill™. Datorita mecanismului sau de polimerizare superior, SimpliShade Bulk Fill reuseste atingerea cu usurinta a adancimii de polimerizare de pana la 5 mm dintr-un singur pas.

Simplitate cu durabilitate

SimpliShade Bulk Fill ofera o rata de uzura redusa, rezistenta ridicata la incovoiere si un efort de contractie comparabil cu celelalte materiale de restaurare in masa disponibile pe piata, asigurand astfel rezistenta in timp a restaurarilor realizate.

Efectul de cameleon


Arhitectura speciala a nanomaterialului de umplere imita structura naturala a smaltului si interactioneaza cu lumina pentru o armonizare perfecta

Rezistenta la incovoiere

SimpliShade Bulk Fill demonstreaza o rezistenta la incovoiere cel putin comparabila cu Concurentul 1 si Concurentul 2, ceea ce duce la o rezistenta mai buna la ciobire si rupere in timp.

Efort de contractie

SimpliShade Bulk Fill ofera un efort de contractie comparabil cu Concurentul 3, determinand reducerea degradarii marginale si a sensibilitatii postoperatorii pentru o restaurare cu rezistenta mai mare in timp.

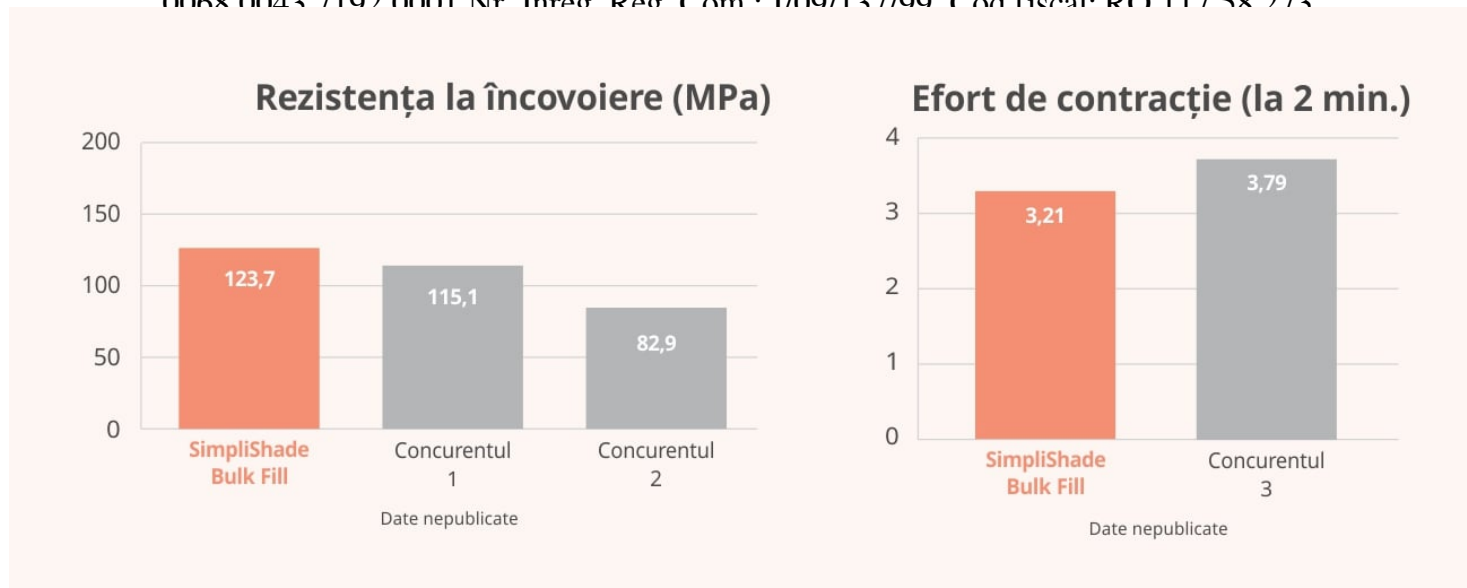


Rata de uzura

SimpliShade Bulk Fill are cea mai scazuta rata de uzura comparativ cu Concurentul 3, Concurentul 1 si Concurentul 2. Rata de uzura scazuta permite obtinerea unei restaurari care va rezista la fortele zilnice de masticatie, periaj si altele.


Luciu initial

SimpliShade Bulk Fill are un luciu initial comparabil cu Concurentul 3 si un luciu initial superior fata de Concurentul 1 si Concurentul 2, ceea ce garanteaza o restaurare cu aspect estetic ridicat.

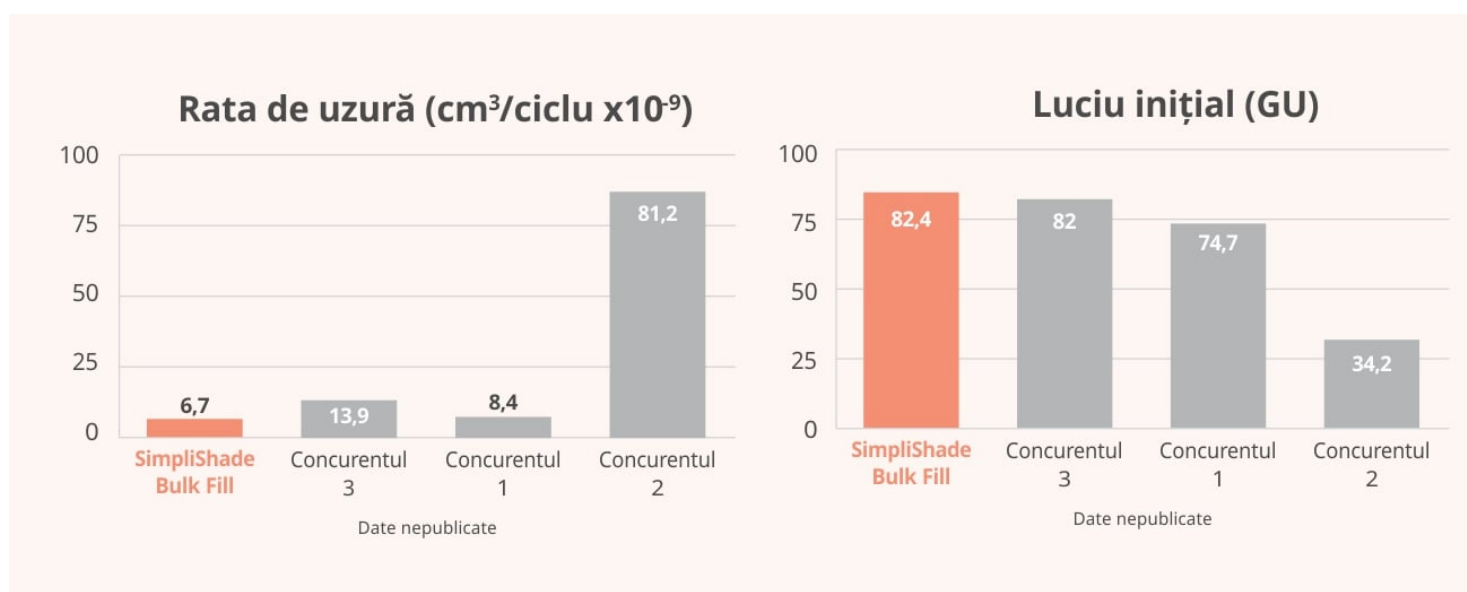


Proprietati de manipulare

Adancime de polimerizare de pana la 5mm

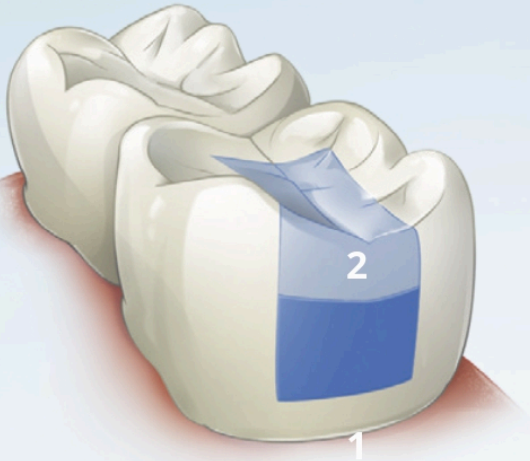

Utilizați compozitul fluid (1) și acoperiți cu SimpliShade Bulk Fill (2)

Realizați o mai bună sigilare și adaptare prin aplicarea compozitului fluid ca liner al cavității (până la 2 mm). După aceea, simplu și fără efort, umpleți cavitățile cu SimpliShade BF până la 5 mm.

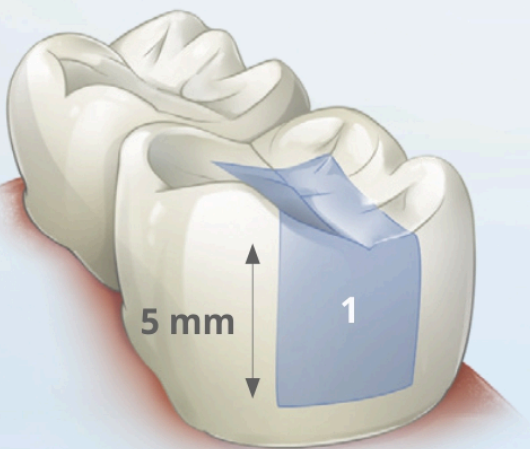

Utilizați doar Bulk Fill pentru 5 mm

Simplu și fără efort, umpleți cavitățile cu SimpliShade BF până la 5 mm.







ART³: O NOUĂ TEHNOLOGIE PENTRU MATERIALELE DE RESTAURARE ÎN MASĂ

Obțineți restaurări fidele datorită tehnologiei de ultimă oră a răspunsului adaptativ (Adaptive Response Technology - ART), demonstrată clinic, cu produsele Harmonize™ și OptiShade Universal Composite. Datorită tehnologiei îmbunătățite de răspuns adaptativ, SimpliShade Bulk Fill oferă caracteristici de manipulare ușoară și contracție redusă.


Tehnologia răspunsului reologic adaptativ pentru o sculptare ușoară

ART3 utilizează modificatori reologici pentru reducerea vâscozității compozitului în timpul manipulării. După ce încheiați modelarea, vâscozitatea se reface și anatomia se stabilizează înainte de fotopolimerizare — ceea ce reduce necesitatea resculptării.

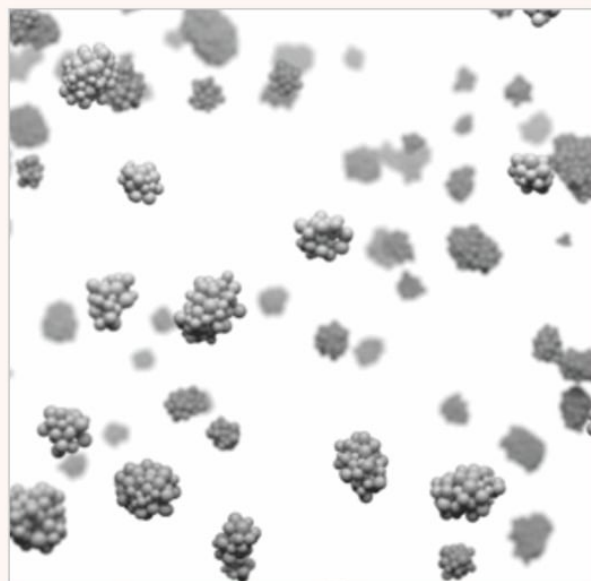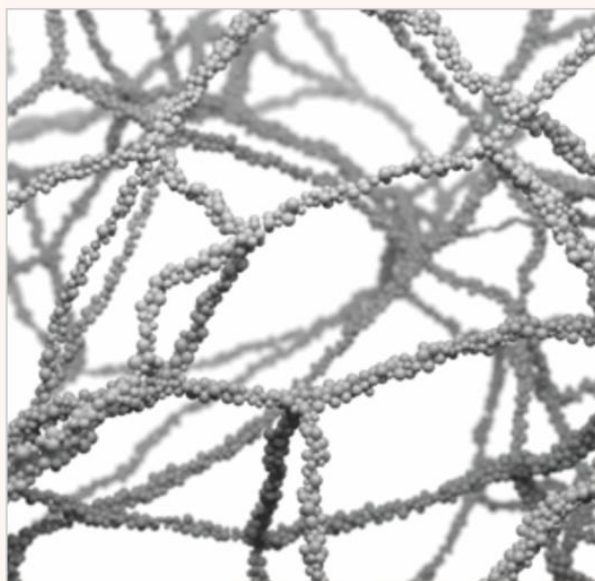

Tehnologia răspunsului adaptativ pentru armonizarea perfectă a culorilor

Obțineți armonizarea excepțională a culorilor datorită nanomaterialelor de umplere care imită structurile smaltului și interacționează cu lumina în mod natural. Restaurarea și dintelă naturală devin practic imposibil de distins între ele.

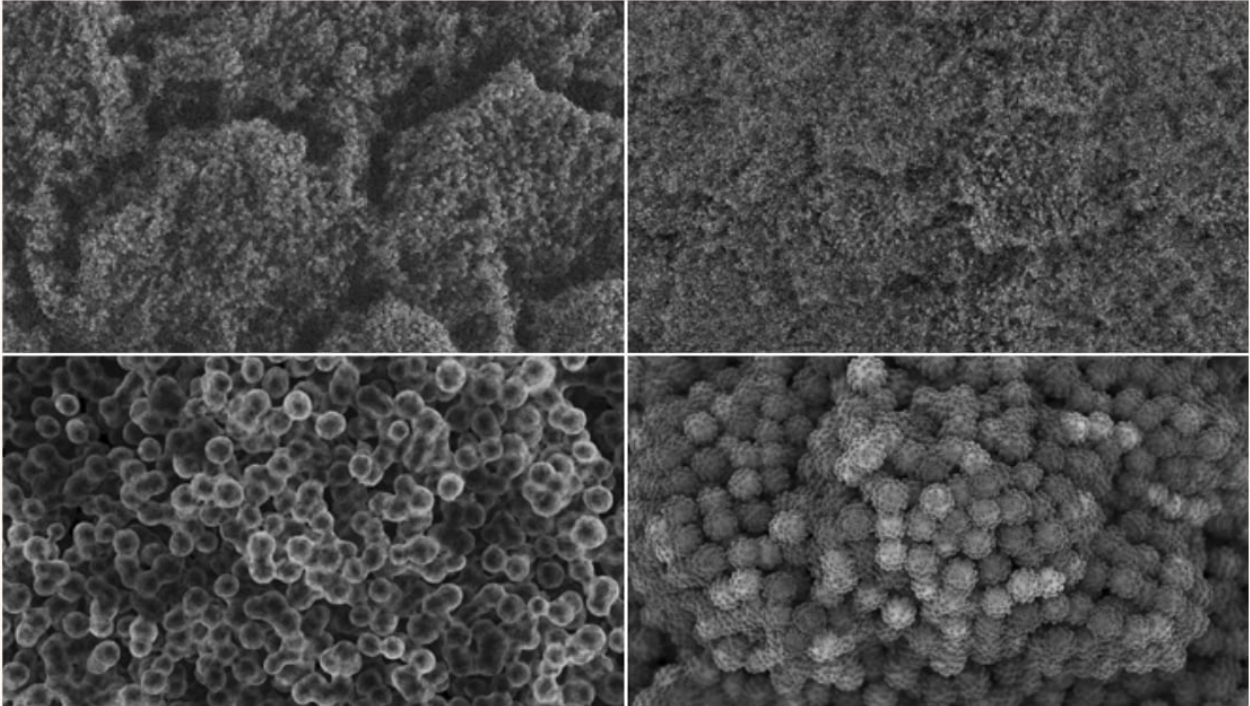

Smalțul uman


SimpliShade Bulk Fill

Tehnologia raspunsului adaptativ la efortul de contractie pentru rezultate durabile

In timpul polimerizarii, SimpliShade Bulk Fill se bazeaza pe rasina cu contractie scazuta si pe designul inovator al nanomaterialului de umplere: nanomaterialele de umplere infuzate cu rasina sporesc elasticitatea, reducand astfel efortul de contractie, iar stratul special micsoreaza tensiunea de interfata. Unificarea celor trei mecanisme de reducere a efortului de contractie sporeste adaptarea si integritatea marginala datorita reducerii la minimum a tensiunii exercitate de restaurarea din compozit asupra stratului adeziv.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

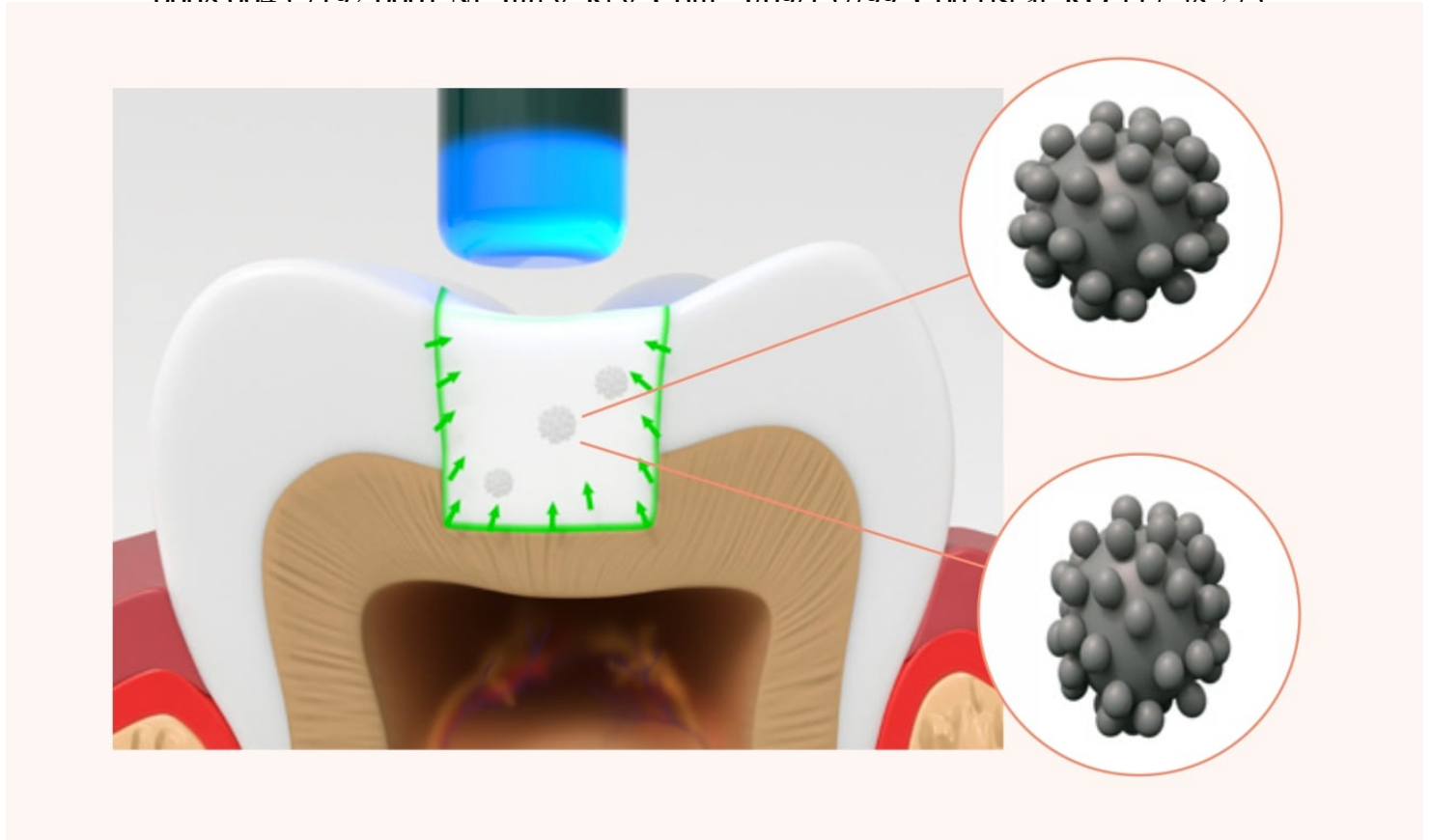

Prezentare video

Prezentare

Seringa 4g