

Dezinfectant Biocid de suprafete Klintensiv 500 ml

Pret:

26,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Iti doresti un cabinet sigur, fara microbi? Iti oferim acum dezinfectantul pentru suprafete gata de utilizare. Cu acest nou dezinfectant, puteti igieniza scaunele de tratament, suprafetele uniturilor dentare, piesele de mana (turbina, contraunghi, piesa dreapta), bratele de sustinere a lampilor, instrumentele stomatologice din otel, aluminiu, cupru, silicon sau cauciuc, dar si alte suprafete de lucru din spatii private sau zone de sanatate publica. Este o solutie cu proprietati dezinfectante, fara alcool, fara aldehide, cu un spectru larg de actiune biocida. Substantele active sunt sarurile cuaternare de amoniu. Recomandam acest produs pentru suprafete delicate si opacizante, sensibile la atacul chimic al solutiilor cu baza alcoolica. A fost creat conform reglementarilor europene privind dezinfectia.

Mod de utilizare: Se pulverizeaza direct pe zona care necesita curatare sau dezinfectare si se distribuie uniform solutia activa peste intreaga suprafata si obiectele care trebuiesc dezinfectate (se poate utiliza o bucata de material textil netesut). Se lasa sa actioneze minim 5 minute. Nu necesita clatire.

Substante active: Clorura de didecildimetilamoniu si saruri cuaternare de amoniu.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tipul de produs biocid conform legislatiei în vigoare (Regulamentul UE nr. 528/2012):

Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide

Tip de produs: 2 – Dezinfectant pentru suprafețe, instrumentar și aeromicroflora cu aplicare prin ștergere, imersie, pulverizare sau nebulizare (ceață rece) în domeniul medical, industrial, instituțional, colectivități, casnic.

Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație

Atentionari: A se folosi numai după ce au fost citite și înțelese instrucțiunile de utilizare. Este recomandată depozitarea în spații închise, curate, bine aerisite, cu temperaturi cuprinse între + 5 °C la + 30°C. Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

Denumirea chimică	Nr. CE	Nr. CAS	Co
Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	
Compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchil dimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	

Stergeți suprafața infectată cu o lavetă înmuiată în soluție dezinfectantă sau pulverizați soluția dezinfectantă peste suprafața contaminată și apoi stergeți cu o lavetă umedă.

Tip dezinfectie	Dozaj soluție
Nivel mediu și scăzut	nediluat
Nivel înalt	nediluat

Modalități de ambalare: 500 ml cu pulverizator