

Cap Kit Scanbodies pentru AoralScan Elite

Pret:

2.897,90 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Cap Kit Scanbodies pentru AoralScan Elite – corpuri de scanare pentru AoralScan Elite

Avantaje:

Compatibilitate completa cu scannerul intraoral AoralScan Elite

Suport pentru fluxuri digitale avansate, inclusiv fotogrammetrie intraorala

Faciliteaza alinierea automata sau manuala in cazurile clinice dificile

Integrare directa in software-ul dedicat (versiuni 3.5.5.3 si superioare)

Disponibil in multiple variante (TIP A - 3DC010302 / TIP B - 3DC010304 / TIP C - 3DC010303 / TIP D - 3DC010301 / TIP E - 3DC010300 / TIP F - 3DC010299)

Date tehnice:

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Material: plastic grad medical

Culoare: gri

Reutilizare: nu

Compatibilitate scanner: Aoralscan Elite

Compatibilitate software: HACS (High Accuracy Capture System)

Tip montaj: pe MUAs (multi-unit abutments)

Procesul de sterilizare pentru scanbody:

1. Clatire:

Dupa indepartarea din cavitatea orala, clatiti imediat scanbody-ul sub jet de apa curenta timp de minimum 1 minut pentru indepartarea preliminara a contaminantilor de pe suprafata. Se recomanda spalarea manuala, la o temperatura a apei intre 15°C si 30°C.

2. Imersie:

Introduceti scanbody-ul clatit intr-o solutie enzimatica de curatare, in concentratie recomandata de 1:100–200 (agent de curatare: apa). Lasati la inmuiat minimum 10 minute pentru a preveni coagularea sangelui in canalele suruburilor.

3. Curatare:

In timpul imersiei, agitati usor solutia pentru a favoriza curatarea canalelor suruburilor, rotind lichidul pana la finalizarea perioadei de inmuiere.

4. Clatire:

Indepartati solutia enzimatica de pe scanbody prin clatire cu apa distilata timp de minimum 1 minut. Asigurati-va ca nu raman contaminanti pe suprafata scanbody-ului.

5. Uscare:

Stergeti usor scanbody-ul cu o laveta curata, fara scame, pana cand suprafata este complet uscata.

6. Sterilizare:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Asezati scanbody-ul in cutia de sterilizare furnizata, sigilati cutia intr-o punga pentru autoclav si introduceti-o in autoclav.

Parametrii de sterilizare:

Sterilizare prin deplasare gravitacionala: 121°C, presiune 102,9 kPa, timp de sterilizare 30 min, timp de uscare 30 min.

Sterilizare prin indepartarea dinamica a aerului: 134°C, presiune 205,8 kPa, timp de sterilizare 4 min, timp de uscare 30 min intr-un cuptor cu temperatura constanta.

Procesul de sterilizare trebuie realizat in conditii de vid.

7. Attentionari:

Nu utilizati ultrasunete pentru curatarea scanbody-ului, pentru a preveni deteriorarea markerilor codati de pe suprafata.

Nu folositi pense metalice pe partea superioara (neagra) a scanbody-ului; prindeti doar partea metalica de la baza, pentru a evita deteriorarea punctelor de codificare.

Daca pe suprafata scanbody-ului apar zgarieturi evidente, intrerupeti utilizarea imediat si inlocuiti componenta.

Prezentare

Cap Kit Scanbodies pentru AoralScan Elite - Kit 12 bucati