

## Solutie curatat instrumente R444 1 litru

Pret:

**173,41 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Solutie concentrata pentru curatarea si intretinerea instrumentarului medical.

Produs destinat uzului profesional, utilizat prin imersie pentru indepartarea impuritatilor, depunerilor si reziduurilor de pe instrumentele medicale si chirurgicale.

Formula sa concentrata permite o curatare eficienta si delicata, fara a afecta materialele metalice sau componentele sensibile ale instrumentelor.

Se foloseste in unitati medicale, laboratoare si cabinete, in conformitate cu normele europene privind siguranta si etichetarea substantelor chimice.

### PRECAUTII DE UTILIZARE

Produs periculos – respectati masurile de precautie pentru utilizatori.

(Intocmit conform reglementarilor europene in vigoare privind clasificarea si etichetarea produselor chimice.)



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Depozitare: între +5°C și +35°C.

Dispozitiv medical Clasa I (conform Directivei 93/42/CEE, cu modificările ulterioare).

## **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

Purtati echipament individual de protectie adecvat inainte de utilizare: masca, ochelari si manusi.

Solutie concentrata pentru uz profesional. Se utilizeaza prin imersie, in dilutie de 0,5% – 5% in apa calda.

Introduceti instrumentele in solutie.

Timp de imersie: intre 1 si 2 ore (verificati starea suprafetei instrumentelor la fiecare 30 de minute).

Cand instrumentele sunt vizibil curate, scoateti-le din solutie.

Clatiti bine si uscati complet.

Reinnoiti baia de imersie cel putin o data pe zi.

## **Prezentare**

Flacon 2 litru