

PACHET Bosklein Servetele dezinfectante V-WIPE tub + Servetele dezinfectante V-Wipe Zero tub



Pret:

85,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Servetele dezinfectante V-WIPE Bosklein tub 200 bucati

Bosklein – Servetele dezinfectante standard cu alcool

Eficace împotriva unui spectru larg de organisme.

Tubul contine servetele ambalate in pungi sigilate.

Dimensiunea servetelelor standard 180x120mm.

Disponibile cu arome de lamaie ,natural, mango.

Spectru de eficienta & Timpul de expunere

Bacterii : MRSA - E Coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - - Enterococcus hirae
Mycobacterium tuberculosis - Clostridium difficile

Virusuri: HIV 1 - H1N1 Gripa A - Hepatita C - Virusul gripal uman B



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Fungus : Aspergillus niger - Candida albicans

Timp de expunere: 30 secunde

Test Standards

BS EN14476 – BS EN13727 – BS EN14204 – BS EN13704 – BS EN13624

Instructiuni de utilizare

Folositi un nou șervetel pentru fiecare actiune de dezinfectare, ștergeți obiectele care urmeaza să fie dezinfectate, astfel încât acestea sa fie complet umezite și lăsați dezinfectantul sa actioneze mai mult de 30 de secunde, permițând apoi dezinfectantului sa se evapore.

Compoziția produsului

Soluția conține, printre alte ingrediente: etanol, propan-2-ol, clorhidrat de biguanidă polimerice, dezinfectanți, Parfum, linalool, limonene.

Proprietăți fizice

Poli vâscoză substrat impregnat cu lichid limpede. Culoare: albă, în funcție de aroma miros, pH-ul 7,0-8,0 de soluție cu o viață de sine de 3 ani.

Dimensiunea servetelilor standard 200x200mm.

Servetele dezinfectante Bossklein V-Wipe Zero tub - 200 bucati

Bossklein – Servetele dezinfectante V-Wipe Zero standard fara alcool, tub.

Eficace împotriva unui spectru larg de organisme.

Tubul contine servetele ambalate in pungi sigilate.

Dimensiunea servetelilor standard 200x200mm.

Disponibile cu arome de lamaie ,natural, mango.

Spectru de eficienta & Timpul de expunere

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Bacterii: MRSA - E Coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - - Enterococcus hirae
Mycobacterium tuberculosis - Clostridium difficile

Virusuri: HIV 1 - H1N1 Gripa A - Hepatita C - Virusul gripal uman B

Fungus : Aspergillus niger - Candida albicans

Timp de expunere: 60 secunde

Test Standards

BS EN14476 – BS EN13727 – BS EN14204 – BS EN13704 – BS EN13624

Instructiuni de utilizare

Folositi un nou șervetel pentru fiecare actiune de dezinfectare, ștergeți obiectele care urmeaza să fie dezinfectate, astfel încât acestea sa fie complet umezite și lăsați dezinfectantul sa actioneze mai mult de 30 de secunde, permițând apoi dezinfectantului sa se evapore.

Compoziția produsului

Soluția conține, printre alte ingrediente: etanol, propan-2-ol, clorhidrat de biguanidă polimerice, dezinfectanți, Parfum, linalool, limonene.

Proprietăți fizice

Poli vâscoză substrat impregnat cu lichid limpede. Culoare: albă, în funcție de aroma miros, pH-ul 7,0-8,0 de soluție cu o viață de sine de 3 ani.

Dimensiunea servetelelor standard 200x200mm.