

PACHET Eurosept Xtra Evac Cleaner + Eurosept Xtra Evac Disinfection



Pret:

89,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Solutie concentrata curatare sistem aspiratie Eurosept Xtra

Concentrat lichid pentru curatarea sistemelor de aspiratie.

Concentrat de curatare acida cu spuma redusa pe baza de acid amidosulfonic pentru curatarea si ingrijirea saptamanala a sistemelor de aspiratie dentare, inclusiv a liniilor de scurgere a acestora. Compatibilitate buna cu materialele.

Instructiuni de utilizare: Se recomanda aplicarea 2 zile pe saptamana.

Solutia de curatare este lasata sa actioneze ca o solutie 5% (50 ml/l apa) timp de 30 de minute. Dupa timpul de expunere, sistemul se clateste bine cu apa.

Compozitie: Regulamentul 648/2004/CE: 5% surfactanti amfoteri, 5% fosfonati, aspect: solutie limpede, incolora, densitate la 20 °C: 1,2 g/cm³, valoarea pH-ului la 20 °C: 2

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Bidon 1L

Solutie concentrata dezinfectare sistem aspiratie Eurosept Xtra

Concentrat lichid pentru dezinfectarea sistemelor de aspiratie.

Pentru curatarea si dezinfectarea sistemelor dentare de aspiratie (inclusiv ejectoare de saliva), separatoare de amalgam si canicule. Concentratul de dezinfectie Eurosept Xtra Evac este utilizat pentru curatarea, dezinfectia si ingrijirea zilnica a sistemului de aspiratie si a caniculei.

Concentratul fara aldehide trebuie mai intai diluat cu apa. Concentratia de aplicare recomandata: 2%. Pentru a face acest lucru, amestecati 20 ml de concentrat cu 980 ml de apa de la robinet si aspirati prin furtunul de aspiratie (ejector de saliva).

Sistemul de extractie trebuie dezinfectat o data sau de doua ori pe zi, in functie de incarcatura. Cuspidorul se dezinfecteaza turnand cca 250 ml de dilutie gata de utilizare. Nu amestecati cu agenti de curatare sau alti dezinfectanti. Pregatiti intotdeauna solutii gata de utilizare proaspete si utilizati imediat.

Potrivit pentru separatoare de amalgam

Poate fi utilizat in unitatile de tratament (de exemplu, Sirona)

Fara aldehide

Lucrari pe baza de compusi de amoniu cuaternar

Formula cu spuma extrem de scazuta

Compozitie: Contine clorura de N,N-dimetil-N-dioctil amoniu, hidroxid de potasiu. Regulamentul 648/2004/CE: Contine 5% surfactanti neionici, 5% surfactanti cationici parfumuri.

Bidon 1L