

PACHET Solutie concentrata dezinfectat amprente Eurosept Plus 5L + Set linguri de amprenta Coltene

Pret:

198,03 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Concentrat lichid pentru dezinfectare amprente.

Introduceti amprenta in solutia dezinfectanta gata de utilizare si indepartati-o din nou dupa timpul de expunere recomandat. Amprenta trebuie acoperita complet cu solutia.

Scufundati alginatii si hidrocoloizii doar pentru scurt timp si lasati sa se usuce, apoi clatiti amprenta cu apa. Nu amestecati cu agenti de curatare sau alti dezinfectanti. In functie de gradul de contaminare, solutia de lucru trebuie reinnoita (recomandare RKI: cel putin in fiecare zi lucratoare). Solutia de lucru poate fi eliminata prin apele uzate.

Timpi de expunere:

Bacteriile (inclusiv MRSA) conform VAH, EN 13727, EN 14561 (sarcina mare): conc. 1 min.;

Levurozid (Candida albicans) conform VAH, EN 13624, EN 14562 (expunere mare): conc.;

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Virucid limitat (virusuri incapsulate de exemplu HBV, HIV, HCV) conform RKI/DVV (cu expunere): conc.

TbB (M. terrae in testul suspensiei, sarcina mica): conc. 15 min.;

Virusi Noro conform EN 14476 (incarcare redusa): conc. 30 min.;

Virusi rotativi conform BGA/DVV (incarcare scazuta): Conc. 1 min. Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/internationale.

Regulamentul 648/2004/CE: Contine 5% surfactanti cationici, parfum.

Compozitie: 100 g de solutie contin 0,24 g clorura de benzil-alchil-C12-16-dimetilamoniu, 0,24 g clorura de N,N-didecil-N,N-dimetilamoniu, 0,24 g C12-14-alchil[(etilfenil)metil] - clorura de amoniu, 0,35 g clorhexidina gluconat.

Prezentare

Bidon 5L

Linguri de amprentă Coltene.

Forma anatomică ușurează montajul, asigurând o amprentă perfectă

- Set 9 bucați (Superior L, Inferior L, Superior Mediu, Inferior Mediu, Superior S, Inferior S, Semiarcada Dreapta, Semiarcada Stanga, Anterior)