

Opalescence Quick 45% refill

Pret:

86,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

PROCEDURA PREMERGATOARE TRATAMENTULUI

1. Inainte de a incepe tratamentul de albire, medicul stomatolog trebuie sa consulte pacientul si sa se asigure de starea de sanatate a tesurilor moi. Restaurarile deficitare trebuie inlocuite, iar cariile trebuie obturate. Suprafetele radiculare expuse pot dezvolta sensibilitate. Daca suprafetele expuse sunt mari, sau daca restaurarile sunt inadecvate, pacientul poate dezvolta durere (moderata pina la severa). Uneori, aceasta problema poate fi rezolvata prin ajustarea gutierei, sau prin aplicarea unui agent bonding de calitate, ca de ex. PermaQuick.
2. Indepartati calculii si petele externe. Daca tesutul este traumatizat, asteptati 1 pina la 2 saptamini inainte de a incepe tratamentul de albire pentru a reduce posibila sensibilitate gingivala.
3. Dupa incheierea tratamentului de albire, asteptati 2 saptamini pina la plasarea restaurarilor- aceasta din 2 motive :a) rezistenta bondingului poate fi semnificativ redusa de reziduurile de peroxid (oxigen) din dentina sau smalt.b) stabilizarea culorii necesita timp, lucru important pentru plasarea restaurarilor definitive .
4. Ocazional, in gutiera se poate observa o coloratie rosie moderata, in vecinatatea obturatiilor de amalgam (care contin Zn). Experienta a dovedit ca aceasta coloratie este lipsita de importanta.

5. Dintii cu restaurări mari de amalgam, pot apărea mai închisi la culoare datorită faptului că amalgamul devine mai vizibil prin smaltul albit. Acești dinți pot necesita restaurări estetice după încheierea tratamentului de albire

6. Unele pete nu răspund la tratamentul de albire. De asemenea, se poate întâmpla că după scurt timp, unele pete care au fost îndepărtate, să reapară. Acest lucru indică faptul că dinții nu au fost receptivi la acțiunea peroxidului și că «albirea inițială» s-a datorat deshidratării smaltului care și-a revenit apoi la culoarea inițială după ce dinții s-au rehidratat. În cazul petelor intrinseci dificile, treimea gingivală a dintelui se va albi ceva mai încet și mai puțin decât celelalte două treimi.

7. Dacă medicul stomatolog bănuiește că pacientul ar putea înghiți gutiera, tratamentul trebuie evitat.

8. Când gutiera nu este utilizată, trebuie păstrată în cutiuta ei.

9. Dinții devitali pot fi albiți rapid prin deschiderea accesului lingual al dintelui. Pacientului i se da o seringă cu Opalescence și un dispozitiv Black Micro Tip și e învățat să-și irige deschiderea linguală cu apă, apoi să-o umple cu Opalescence Quick. Apoi se încarcă și se introduce gutiera în cavitatea bucală. Evaluați periodic procesul, deoarece dinții devitali se pot albi semnificativ mai rapid decât cei vitali.

PROCEDURA

1. Pentru a accelera efectul gelului, încălziți seringă în prealabil. Țineți seringă sub jet de apă caldă timp de 2-3 minute. Temperatura gelului nu trebuie să fie prea mare, pentru a nu leza țesuturile moi. Testați temperatura gelului înainte de a insera gutiera, pentru a evita posibile lezări ale țesutului.

2. Confectionați gutiera respectând instrucțiunile.

3. Durata tratamentului poate varia de la pacient la pacient. Fiecare sesiune de tratament trebuie să dureze între 30 minute și 2 ore. Dacă intenționați să efectuați tratamentul cu Opalescence Quick, ca un inițiator al tratamentului urmat acasă de către pacient, atunci este necesară doar o sesiune în cabinetul stomatologic, după care pacientul poate merge acasă cu Opalescence 10% carbamid peroxid.

4. Ocazional, sensibilitatea poate necesita tratament. Tehnicile citate în literatură și care pot fi eficiente, sunt:

a) pacientul va purta gutiera încărcată cu un gel neutru viscos, ce conține nitrat de potasiu (UltraEz).

b) administrarea unor medicamente analgezice-antiinflamatorii ca de ex. ibuprofen sau aspirina.

ATENȚIE

1) Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Acordați mare atenție designului gutierei și planificați tratamentul astfel încât să asigurați și mențineți confortul pacientului.

2) Starea de sanatate a cavitatii bucale trebuie sa fie foarte buna.

3) Desi nu au fost evidentiate probleme, ca o masura de precautie, Opalescence Quick nu trebuie folosit in timpul sarcinii.

4) Exista unele date care indica faptul ca peroxizii potenteaza actiunea unor agenti carcinogeni. Ca o masura de precautie, pacientii care sunt fumatori sau consumatori de alcool, trebuie sa intrerupa fumatul si consumul alcoolului in timpul tratamentului de albire.

5) Daca pacientul prezinta alergii sau sensibilitate chimica la peroxizi, carbopol, glicerina etc., nu trebuie sa urmeze tratamentul de albire cu Opalescence Quick.

6) Inainte de introducerea gutierei in cavitatea bucala, dintii trebuie curatati.

7) Restaurarile trebuie sigilate corect, iar toate suprafetele dentinare expuse existente, trebuie acoperite. Daca pacientul prezinta antecedente de sensibilitate, trebuie realizata o restaurare adecvata, cu un agent bonding, etc, sau temporar, cu un sigilant de dentina.

8) Pot exista arii de decalcifiere care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Zonele de decalcifiere se vor albi mai rapid, devenind mai evidente in timpul procesului de albire. Continuati tratamentul pina ce si restul suprafetei dintelui ajunge la aceeasi culoare. Reevaluati situatia la 2 saptamini dupa incheierea tratamentului de albire, cind culoarea s-a stabilizat.

9) Daca pacientul dezvolta sensibilitate, gutiera trebuie indepartata. Daca problema persista, intrerupeti tratamentul.

10) Informati pacientii asupra faptului ca obturatiile si coroanele existente nu se vor albi.

11) Monitorizati cu atentie tratamentul pentru a preveni albirea dintilor pina la gradul de transluciditate.

12) Opalescence Quick este livrat in seringi de 1,2 cc, gata incarcate. Substanta nu trebuie injectata.

13) Produsul trebuie pastrat la frigider. Feriti-l de actiunea caldurii si de lumina soarelui.

14) Daca disconfortul gingival sau dentar persista (ca de ex o sensibilitate excesiva la rece), invatati pacientul sa-si scoata gutiera, sa intrerupa tratamentul si sa contacteze medicul stomatolog.

15) Pacientii cu bruxism pronuntat sau cu ocluzii problematice, pot necesita un material de gutiera de grosime mai mare.

16) Cind este pusa la frigider, seringa poate capata un aspect inghetat. Daca e lasata la temperatura camerei, aspectul seringii va reveni la normal. Acest lucru nu afecteaza eficacitatea produsului.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- 1 x seringă 1,2 ml + varf aplicare