

Ufi Gel P SET 2*50ml+catalizator+glaze+accesorii



Pret:

933,43 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ufi Gel P (permanent) este un material suplu pentru rebazari pe baza de silicon A.

Materialul Ufi Gel P auto-polimerizabil cu priza la rece va garanteaza un mod de lucru simplu si rapid.

Setul contine un lichid adeziv pentru obtinerea unei bune adeziuni intre proteza si materialul de rebazare. Printre altele contine pasta de baza si catalizatorul precum si lichidul catalizator si baza (glazing) pentru finisarea suprafetelor polizate.

Indicatii:

- Rebazari suple permanente ale protezelor.

Mod de aplicare

Curatati bine proteza cu ajutorul unei perii si uscati. Retentionati baza protezei si curatati-o cu alcool. Retentionati suprafetele vestibulare si linguale pe o inaltime de 3-4mm si rortunjiti marginile protezei. Aplicati un strat subtire de Ufi Gel P adeziv pe suprafetele tratate la care Ufi Gel P trebuie sa adere. Lasati sa actioneze aprox. 1 ora.

Ufi Gel P ar trebui sa aiba o grosime de min.2 mm in locurile rebazate.

Necesarul Ufi Gel P este:

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- proteze maxilare între 6-9 cm de baza și catalizator.
- proteze mandibulare între 4-5 cm de baza și catalizator.

Rebazari in laborator:

Utilizati cantitati identice de Ufi Gel P baza si catalizator si malaxati-le aprox. 1 min. Aplicati materialul malaxat cu spatula mai intai pe bordura linguala si apoi pe cea vestibulara.apoi acoperiti baza, izolati modelul de gips,fixat proteza in articulador si puneti-o impreuna cu articuladorul intr-un recipient de presiune (30-40 C) pentru o jumatate de ora.

Rebazari direct in cavitatea bucala

Acoperiti cu Ufi Gel P toate zonele protezei ce se afla in contact cu tesaturile. Dupa aprox. 2 min. proteza poate fi inserata in gura pacietului.

Pacientul trebuie sa inchida usor gura in ocluzia normala si sa o mentina in aceasta pozitie aprox. 2 min. Se efectueaza miscari de masticatie si deglutitie timp de aprox. 2 min.

Dupa 7-10 min. proteza poate fi scoasa din gura.

Excesul de material poate fi inlaturat cu grija cu ajutorul unui instrument ascutit,foarfeca sau cutit de ceara.

Finisarea rebazarii:

- Pietre rugoase si polipanturi.

Prezentare:

- **50 ml baza**
- **50 ml catalizator**
- **10 ml glazing**
- **10 ml catalizator**
- **10 ml adhesive**
- **accesorii**